

Aumed[®]

EYE-C

Benutzerhandbuch



elektronische Lupe
für Sehbehinderte

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	3
2. Über diese Anleitung.....	4
3. Sicherheit und Wartung.....	5
4. Eye-C elektronische Lupe Packungsinhalt.....	7
5. Tasten, Anschlüsse und Anzeigen.....	8
6. Bedienung.....	9
7. technische Daten.....	12
8. Gewährleistung.....	13
Vertrieb:.....	13
Hersteller.....	13

**English Version: Version Number_1.3
Copyright 2009 by Aumed,
All rights reserved**

**deutsche Übersetzung: Version Number_1.02
Copyright 2009 by fluSoft GbR,
Alle Rechte vorbehalten
mit freundlicher Genehmigung der Aumed Group Corp.**

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Eye-C, eine einfache, mobile elektronische Lupe von Aumed. Nutzen Sie das Eye-C zum Lesen, Schreiben, Anschauen von Fotos, Handarbeiten und vielem mehr.

Das Eye-C ermöglicht Ihnen gedruckten Text, Bilder und Objekte mit einer bis zu 15-fachen Vergrößerung, in verschiedenen Farben zu betrachten. Mit seinem ergonomischen Design, bereichert das Eye-C im Bedien- und Lesekomfort. Das Eye-C kann fast überall genutzt werden.

Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Vorschläge bezüglich der Benutzung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den Aumed Hauptsitz mit Hilfe der am Ende dieser Anleitung befindlichen Kontaktinformationen. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir hoffen dass Sie die Arbeiten mit der Eye-C genießen.

2. Über diese Anleitung

Diese Anleitung bietet ausführliche Hinweise zu den Funktionen und Bediensritten der Eye-C Video-Lupe. Abbildungen in dieser Anleitung können von der eigentlichen Situation abweichen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Eye-C sorgfältig durch und lagern Sie sie an einem sicheren Ort für späteres Nachschlagen.

3. Sicherheit und Wartung

- Setzen Sie das Eye-C nicht plötzlichen Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Diese Situation kann zu Schäden an Elektronik und Optik des Eye-C führen.
- Schalten Sie die Stromversorgung ab wenn das Gerät nicht in Benutzung ist.
- Betreiben Sie die Eye-C nicht unter $+5^{\circ}$ oder über $+40^{\circ}$ Celsius.
- Vor der ersten Nutzung des Eye-C müssen die Batterien mehr als 4,5 Stunden aufgeladen werden um die Nutzungsdauer von 4 Stunden zu erreichen.
- Zum Laden des Akkus nur den mitgelieferten Strom-Adapter mit dem DC-Anschluss des Eye-C verbinden.
- Halten Sie die Kamera-Linse sauber. Benutzen Sie nicht Ihre Hände oder andere Objekte um sie zu säubern.
- Achtung: Nach einer Nutzungsdauer von 6 - 12 Monaten, kann die Akku-Laufzeit abnehmen.
- Vermeiden Sie Beulen am Gerät, starkes Schütteln, harten Druck oder das Herunterfallen des Gerätes.

- Zerlegen Sie nicht die elektronische Lupe.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler wenn eine Reparatur vorgenommen werden muss.
- Bewahren Sie das Gerät und die dazugehörigen Akkus an einem trockenen Ort auf. Halten Sie das Gerät von Dampf, Wasser, Staub und extremen Temperaturen fern. Die beste Lager- und Aufbewahrungstemperatur für dieses Produkt ist 5°C~40°C


Die Benutzung des Eye-C auf andere Weise als in dieser Anleitung beschrieben, schließt die Garantie aus.

4. Eye-C elektronische Lupe Packungsinhalt





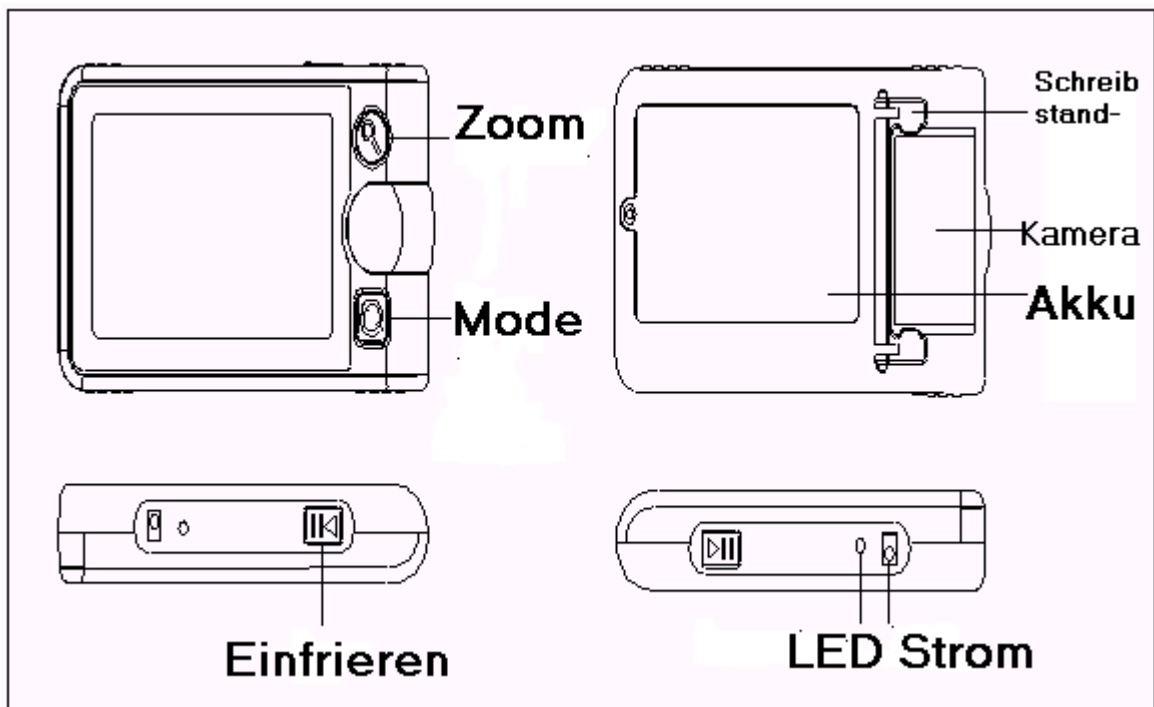


- ① die Eye-C elektronische Lupe
- ② Stromadapter
- ③ Aufbewahrungstasche
- ④ Reinigungstuch
- ⑤ Handschlaufe
- ⑥ Trageband
- ⑦ dieses Handbuch

5. Tasten, Anschlüsse und Anzeigen




- Zoom, Vergrößerung einstellen
- Mode, Wiedergabemodus wählen, Farbe, Schwarz/Weiß, Kunstfarben
- Einfrieren, Bild aufnehmen oder Livebild
- Schreibstand, ausklappbarer Fuß zum besseren Schreiben unter der Eye-C
- Kamera, das Kamerafenster
- Akkufach
- LED, Ladeindikator
- Strom, Anschluss der Stromversorgung

6. Bedienung

- Ein- und Ausschalten
Drücken sie die Taste  oder  für ca. 3 Sekunden um das Gerät ein- bzw. wieder auszuschalten.
Nach dem Einschalten ist die Eye-C im Vollfarbmodus.
Plazieren Sie die Kamera (angezeigt durch das -Symbol) auf das zu betrachtende Objekt. Die Eye-C ist nun bereit.
- Einstellen der Vergrößerung
Sie haben 5 Vergrößerungsstufen, die Sie mit der Taste  einstellen. Wenn der Schreibfuß eingeklappt ist, erhalten Sie so Vergrößerungen von 4x, 5x, 8x, 12x und 17x. Mit ausgeklapptem Schreibfuß beträgt der Vergrößerungsfaktor: 3x, 4x, 6x, 8x und 12,5x. Wenn Sie die Kamera weiter vom Objekt wegbewegen, vermindert sich die optische Vergrößerung dementsprechend.
- Betrachtungsmodi
Durch Drücken der Taste  können Sie den Betrachtungsmodus auswählen. Die Eye-C hat sieben verschiedene Modi.



-  Vollfarbmodus, es wird der Text, Bilder oder jedes andere Objekt in seinen Originalfarben dargestellt.



Kontrastmodus Positiv: Bilder und Text werden im Schwarz/Weiß Modus – schwarzer Text mit weißem Hintergrund dargestellt.



Kontrastmodus Invers: Bilder und Text werden im Schwarz/Weiß Modus – weißer Text mit schwarzem Hintergrund dargestellt.



Hoher Kontrast, Blau auf Gelb




Hoher Kontrast, Gelb auf Blau





Hoher Kontrast, Blau auf Weiß






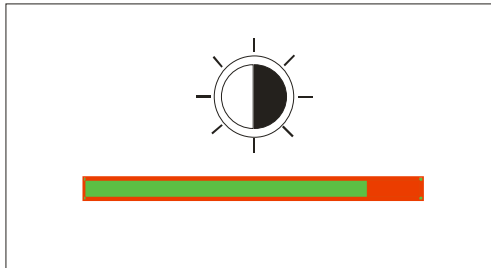
Hoher Kontrast, Gelb auf Schwarz

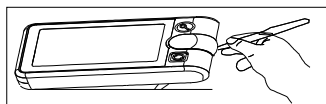- Bild einfrieren
Drücken Sie die Taste  um das Bild einzufrieren. Wenn Sie diese Taste erneut drücken, wird wieder das Livebild angezeigt.
Im eingefrorenen Zustand können Sie die Vergrößerung und den Anzeigemodus, wie oben beschrieben, ändern.
- Schreibfuß
Nutzen Sie den Schreibfuß an der Unterseite der Eye-C um komfortabler Schreiben zu können.



- Helligkeitseinstellung
Drücken und halten Sie die Taste  für 3 Sekunden. Die Eye-C zeigt nun einen Helligkeitsbalken an. Mit den

Tasten n  und  können Sie nun die Helligkeit einstellen. Drücken Sie nun die  -Taste wieder für 3 Sekunden.



- **Automatisches Abschalten**
Die Eye-C unterstützt die automatische Selbstabschaltung um Strom zu sparen. Wenn nach 3 Minuten keine Aktivität bemerkt wird, schaltet sich die Eye-C ab. Sie kann durch Drücken jeder beliebigen Taste wieder 'geweckt' werden. Im Einfrierer-Modus schaltet sie sich nach 4 Minuten ab.
- **Akku-Anzeige, neben der Strombuchse**
 - * rotes Blinklicht: Akku muss geladen werden
 - * grünes Blinklicht: Akku wird geladenWenn der Akku voll ist, erlischt das grüne Licht

7. technische Daten

Vergrößerungsstufen	5
Anzeigemodi	7
Einfrieren-Funktion	Ja
Vergrößerung/Anzeigemodi im Einfrieren-Modus	Ja
Schreibfuß	Ja
Li-Ion-Akku-Kapazität	3000 mAh
Laufzeit	4,5 bis 5,5 Stunden
Ladezeit	4,5 Stunden
Stromsparmmodus	Ja
LCD Monitor	4,3 Zoll TFT
Maße	152 x 81 x 28,5 mm
Stromadapter	Eingang 110 – 240 V
	Ausgang 5 V / 1500 mA
Temperaturbereich	-5°C to +40°C
Luftfeuchtigkeit	< 70%, no condensation

8. Gewährleistung

Diese Produkte wurden entwickelt um Ihnen die am weitesten entwickelte Technologie, höchste Qualität und einen guten Preis zu liefern.

Die Garantie ab dem Kaufdatum richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Vertrieb:

fluSoft GbR
Tannenstrasse 2
D 01099 Dresden, Deutschland

Tel.: +49/0 351-40457 0
Fax.: +49/0 351-40457 77
Web: <http://www.flusoft.de>
Email: info@flusoft.de



Hersteller

The Aumed logo consists of the word "Aumed" in a bold, red, sans-serif font, set against a light gray rectangular background.

Aumed

Aumed Corp.
Rm.1206/1212 High-Tech Building,
229 Bei Si Huan Zhong Road;
Haidian District, Beijing 100083
P. R. China