

Gebrauchsanweisung

PennyTalks (PT)

Ihr persönliches, sprechendes Markierungssystem
mit gesprochener Benutzerführung und Sicherungsmöglichkeit.


Schnellstart

Platzieren Sie ein selbstklebendes Etikett auf einem Gegenstand, den Sie markieren möchten.

Halten Sie die Sensorspitze auf das Etikett und nehmen Sie eine Beschreibung auf.


Spielen Sie Ihre Aufnahme ab, indem Sie die Sensorspitze erneut auf das Etikett halten.

Vorderseite

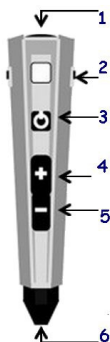

- 1 Lautsprecher
- 2 Kopfhörer
- 3 Ein / Aus
- 4/5 Lautstärke
- 6 Sensor

Rückseite

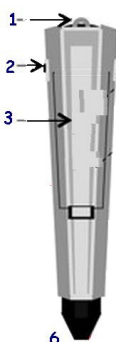

- 1 Öse für Umhängeband
- 2 Kopfhörer/Mikrofon
- 3 Batteriedeckel

Die Speicherkarte befindet sich unter den Batterien

PT ist mit einer wechselbaren Speicherkarte ausgestattet, auf der alle Aufnahmen gespeichert werden. Sollten Sie Ihren PT einmal beschädigen, gehen Ihre Aufnahmen also nicht verloren.

Einstellen der Gerätesprache

PennyTalks bietet Ihnen die Wahl zwischen 12 verschiedenen Sprachen.

Darüber hinaus ist auch ein Signalton Modus verfügbar.

1. Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter für 3 Sekunden.
2. Nehmen Sie die Sprachwahlkarte und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
3. Halten Sie den Sensor auf das Markierungsfeld für die gewünschte Sprache.
4. PT quittiert die Auswahl durch Ansage der Sprache, die nun gewählt ist.

Ein- und Ausschalten

Legen Sie zunächst die Batterien ein. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter für 3 Sekunden gedrückt. Die Sprachausgabe sagt Ihnen jeweils an, ob das Gerät Ein- oder Ausgeschaltet wurde.

Nach 60 Sekunden ohne Benutzung schaltet es sich automatisch ab.

Beschreibung für ein Etikett aufnehmen

1. Berühren Sie das Etikett so lange mit dem Sensor, bis die Ansage: "Neues Etikett" ertönt.
2. Drücken Sie die + Taste oder die - Taste, bis der Beginn der Aufzeichnung angesagt wird.
3. Halten Sie die Taste solange weiter gedrückt, bis Sie Ihre Beschreibung aufgesprochen haben.
4. Lassen Sie die Taste wieder los.
5. Ihre Aufnahme wurde gespeichert.

Lautstärke

Drücken Sie die + Taste zum Erhöhen oder die - Taste zum Verringern der Lautstärke.

Wiedergabe

Halten Sie den Sensor in den markierten Kreis eines Etiketts.

PT gibt nun die aufgezeichnete Beschreibung wieder.

Löschen einer Beschreibung

1. Etikett mit dem Sensor berühren.
2. Die Aufnahme wird abgespielt.
3. Halten Sie + und - solange gleichzeitig gedrückt, bis das Löschen bestätigt wird.
4. Sie können nun neu aufnehmen.

Lieferumfang

- PennyTalks Lesestift
- 2 Batterien AAA (nicht wiederaufladbar)
- Netzteil (ohne Ladefunktion)
- Umhängeband
- Kopfhörer
- 160 selbstklebende taktile Etiketten sowie 72 waschbare und trockenresistente Etiketten
- MicroSD-Speicherkarte

Technische Daten

- Länge 163 mm
- Höhe 35 mm
- Gewicht 76 g
- Durchmesser 35 mm
- Stromversorgung 2xAAA / Netzgerät



B H V D

Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden

**Tannenstrasse 2
D 01099 Dresden**

Tel. 03 51 / 404 57-75
Fax 03 51 / 404 57-77

eMail info@bhvd.de
Web: <http://www.bhvd.de>