

ActiVo))cal

AMPLITALK 100

sprachgesteuertes Festnetz-Telefon mit Verstärker

Handbuch

DDV-245-000 Rev: A (DE)



Kontakt:

Email: info@vocally.de
Tel: +49/0 351 40457-0

Web: <http://www.vocally.de>
Fax: +49/0 351 40457-77

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:.....	3
Über dieses Handbuch.....	3
Kapitel 1: Installation / erste Schritte.....	4
Ansicht: rechte Seite.....	5
Anschluss und Installation.....	5
Wandmontage.....	6
Klingel Einstellungen.....	6
Anpassen der Lautstärke und des Tons eingehender Anrufe.....	6
Amplify Switch – Verstärker Schalter.....	7
Hold - Halten.....	7
Memory - Speichertasten und Funktionstasten.....	7
Kapitel 2: Spracherkennungsfunktion.....	8
Den ersten Namen trainieren.....	8
Die Kommandos (Ziffern) trainieren.....	8
Sprachgesteuertes Wählen.....	9
Bitte beachten Sie:.....	9
Löschen einer Nummer.....	10
Methode 1:.....	10
Methode 2:.....	10
Alle Telefonnummern / Namen löschen.....	10
Löschen der Kommandos.....	11
Wiedergabe aller gespeicherten Einträge.....	11
Kapitel 3: weitere Funktionen.....	11
Arbeiten mit einer Telefonanlage.....	11
Menüsprache einstellen.....	12
Kapitel 4: Speichertaste, Weiterleitung.....	12
Taste: Redial / P (Redial / Pause).....	12
Taste: PROG, Direktwahltasten M1, M2, M3.....	12
Speichern einer Nummer in einer Zielwahltaste.....	13
Anrufen einer in M1, M2 oder M3 gespeicherten Nummer.....	13
Zwei Tasten Direktwahl-Speicher.....	13
Speichern einer Nummer in einer Two Touch-Speichertaste.....	14
Anrufen einer in einer Two Touch-Taste gespeicherten Nummer.....	14
Flash-Taste.....	14
Kapitel 5: Technische Daten.....	15
Technische Daten.....	15
Häufige Fragen und deren Antwort (FAQ).....	15
Wichtige Hinweise.....	16
Vertrieb:.....	16
Hersteller:.....	16

Vorwort

Das AmpliTalk100 ist die neueste Entwicklung in der Vocally Familie. Jahrelange Entwicklung, Marktforschung, Kundenfeedback und der Einsatz der modernsten Spracherkennungstechnologie ermöglichten uns, dieses innovative Telefon mit Sprachwahl zu entwickeln. Wir sind stolz, sagen zu können, dass es das zur Zeit beste Gerät seiner Art auf der Welt ist. Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Hilfe beim Einsatz unserer Sprachwahl-Telefons.

Spracherkennung ist eine relativ junge Technologie, die ständig in Entwicklung ist und in immer mehr Geräte integriert wird. Wir bitten Sie, bei der Nutzung daran zu denken, dass diese Maschine, trotz ihrer hochentwickelten Technik, nicht besser hören kann als wir. Sie kann Ihre Stimme nicht erkennen, wenn laute Nebengeräusche auftreten. Manchmal muss man Vocally etwas zweimal sagen, bevor es einen versteht. Mit diesem Wissen, sind wir sicher, werden Sie mit Ihrem Vocally zufrieden sein.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

- Speichert und wählt bis zu 45 Telefoneinträge
- Jede gespeicherte Nummer kann bis zu 45 Ziffern lang sein
- Sehr einfach und leicht zu bedienen
- Stört nicht das regulären Telefonieren (durch das Vorwählen einer beliebigen Zifferntaste, z.B. „0“ wird die Amtsleitung geholt)
- Sehr schnelle Wahl ohne Fehler
- Funktioniert mit jedem analogen Festnetzanschluss
- Erkennt jede Sprache, Dialekt und Akzent
- Interaktives Sprachmenü
- modernste Spracherkennungstechnologie
- Gespeicherte Namen werden wiedergeben
- Elegantes Gehäuse mit großen Tasten
- FCC Abschnitt 15 und 68 zugelassen
- Hochwertige Sprachaufnahme und -wiedergabe
- Fehlerprüfung durch Line-Detektion mit Audio-Warnung
- Menübasierte Sprachenauswahl

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch ist in 4 Hauptabschnitte gegliedert:

- Kapitel Eins erklärt die Installation von AmpliTalk und dessen Bedienelement.

- Kapitel Zwei erklärt, wie Namen hinzugefügt und gelöscht werden können. Es wird auch erklärt, wie Sie eine Verbindung nur mit Hilfe Ihrer Stimme aufbauen.
- Das Kapitel Drei beschreibt, wie Sie eine Nummer während eines Telefonats wählen können, erklärt die Arbeit mit einer Freisprecheinrichtung und das Einstellen der Nutzersprache.
- Das Kapitel vier erklärt die weiten Funktionen, wie Direktwahlspeicher, Redial und Weiterverbinden.
- Im fünften Kapitel werden häufige Fragen beantwortet (FAQ), technische Informationen vermittelt, wichtige Hinweise gegeben und die Garantiebestimmungen angegeben.


Kapitel 1: Installation / erste Schritte

Dieses Kapitel erklärt die Installation von AmpliTalk100. Diese kurze Anleitung hilft Ihnen dabei, Ihr AmpliTalk in wenigen Minuten anzuschließen und einzurichten.

Achtung: Bevor Sie dieses Telefon verwenden und um mögliche akustische Schocks zu vermeiden, müssen alle Benutzer, die **nicht** hörgeschädigt sind, sicherstellen, dass sich der Schalter „Amplify“ unter dem Telefon im Modus „Manual“ befindet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Amplify Switch“.



Ansicht: rechte Seite

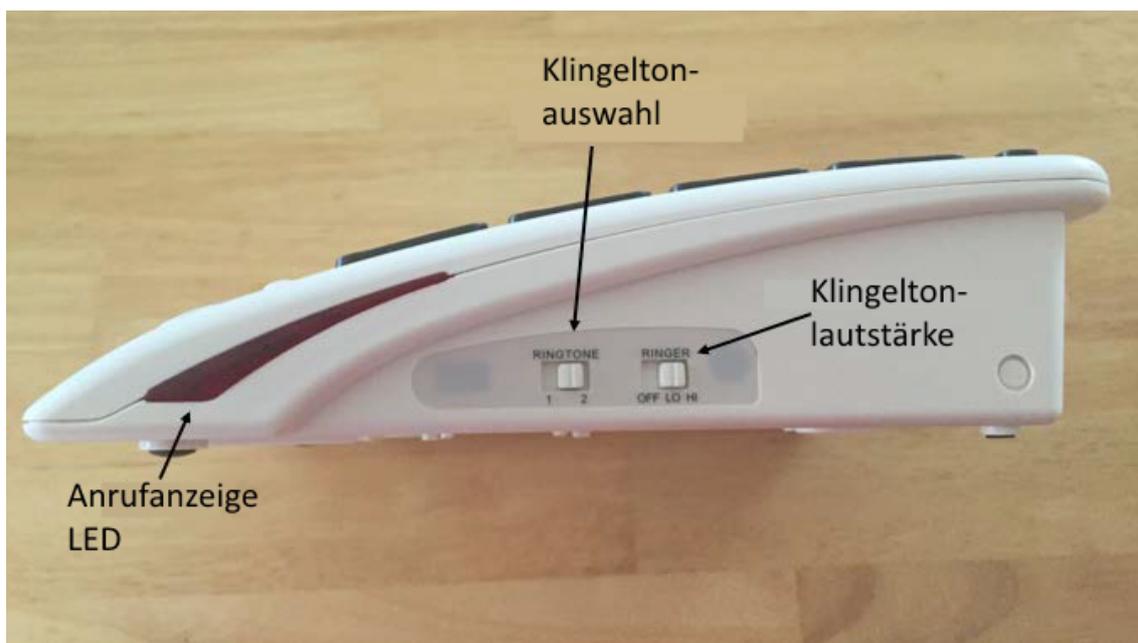

Anschluss und Installation

Stecken Sie ein Ende des verdrehten Kabels in die dafür vorgesehene Buchse am Ende des Mobilteils (Hörer) und das andere Ende in die Buchse an der linken Seite des Telefons. Schließen Sie das gerade Telefonkabel an die Buchse an der Rückseite des Telefons an. Stecken Sie das andere Ende (TAE) in die Telefonsteckdose (F-Buchse).

Wandmontage

Das AmpliTalk kann mit den folgenden Schritten an die Wand montiert werden:

- A) Am Grundgerät befindet sich in der Hörschale an der unteren Seite ein kleines Schiebeelement. Schieben Sie dies nach oben, drehen es und schieben Sie es wieder in die Führung. Nun steht es etwas hervor und bildet so einen Haken, um den Hörer nach der Wandmontage sicher zu halten.
- B) Platzieren Sie die mitgelieferte Wandhalterung mit den daran befindlichen Nasen an den Nuten an der Rückseite des Telefons und klicken Sie diese ein. Sie müssen die Wandhalterung in der Nähe der Nasen dazu etwas zusammen drücken.
- C) Wählen Sie eine geeignete Stelle zur Wandmontage und vergewissern Sie sich, dass dort keine Leitungen oder Kabel verlegt sind. Natürlich muss auch ihr Telefonkabel bis zu dieser Stelle reichen.
- D) Schrauben Sie nun 2 Schrauben, je nach Beschaffenheit der Wand mit Dübeln, im Abstand von ca. 10 cm senkrecht in die Wand, wobei die Schraubenköpfe hervorstehen müssen.
- E) Schieben Sie nun die Löcher der Wandbefestigung an der Rückseite des Telefons über die Schraubenköpfe und dann nach unten. Justieren Sie die Schrauben so, dass das Telefon fest an der Wand befestigt ist.

Klingel Einstellungen

Auf der rechten Seite des Telefons befinden sich 2 Schalter, mit denen die Einstellungen „High“, „Low“ und „Off“ und 2 Melodien gewählt werden können.

Hinweis: Der AmpliTalk zeigt alle eingehenden Anrufe mit blinkenden LED-Anzeigen an der Vorder- und rechten Seite des Telefons an, auch wenn der Klingelton ausgeschaltet ist.

Anpassen der Lautstärke und des Tons eingehender Anrufe

Vorsichtsmaßnahme - Achtung: Bevor Sie dieses Telefon verwenden und um mögliche akustische Schocks zu vermeiden, sollten sich alle Benutzer, die nicht hörgeschädigt sind, vergewissern, dass sich das Telefon im manuellen Modus befindet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Amplify Switch“.

Die Lautstärke und der Ton der über das Handteil empfangenen Sprache können angepasst werden, um schwerhörigen Benutzern zu helfen. Diese Einstellungen können mit den 2 Schiebeschaltern an der Vorderseite des Telefons vorgenommen werden.

Um diese Schiebeschalter zu aktivieren, muss die Taste „Amplify“ gedrückt werden. Ein rotes LED-Licht auf der Vorderseite bestätigt diese Aktivierung.

- A) Nehmen Sie den Hörer ab
- B) Drücken Sie die "Amplify" -Taste (die rote LED leuchtet)
- C) Stellen Sie die Schiebeschalter nach Bedarf ein

Hinweis: Wenn sich der Schalter „Amplify“ (unter dem Telefon) im Modus „Auto“ befindet, ist das Drücken der Taste „Amplify“ nicht erforderlich.

Amplify Switch – Verstärker Schalter

Wenn sich der Verstärker-Schalter (unter der Basisstation) im manuellen Modus befindet, wird der verstärkte Ton im Empfänger am Ende jedes Gesprächs stumm geschaltet, wenn der Hörer aufgelegt wird.

Der manuelle Modus ist praktisch, wenn verschiedene Benutzer, die schwerhörig sind oder nicht, dasselbe AmpliTalk-Telefon verwenden. Die manuelle Aktivierung dieser Funktion bei Bedarf durch Drücken der Taste „Amplify“ (Verstärken) minimiert den potenziellen akustischen Schock für Personen, die nicht schwerhörig sind.

Wenn der AmpliTalk jedoch immer mit aktivierter Empfangsverstärkung verwendet werden soll, muss sich der Schalter „Amplify“ im Modus „Auto“ befinden. Auf diese Weise bleibt die Verstärkung auch nach jedem Auflegen des Hörers aktiv.

Hold - Halten

Wenn Sie diese Taste während eines Gesprächs drücken, wird der andere Teilnehmer in die Warteschleife geschaltet (mit Musik in der Warteschleife). Ein rotes Licht leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich jemand in der Warteschleife befindet. Um das Gespräch mit dem Gesprächspartner fortzusetzen, drücken Sie erneut die Taste Halten.

Memory - Speichertasten und Funktionstasten

Diese Funktionen sind aktiv, wenn der Benutzer die Sprachaktivierungsfunktion deaktivieren möchte. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.

Kapitel 2: Spracherkennungsfunktion

In Kapitel 2 wird erklärt, wie Sie Namen hinzufügen, einen oder mehrere Namen löschen, gespeicherte Namen anhören und vor allem einen Namen nur mit Ihrer Stimme wählen.

Den ersten Namen trainieren

Nun können Sie den ersten Namen trainieren:

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab. AmpliTalk liest Ihnen das Menü vor. Drücken Sie die „1“ - dies ist zu jeder Zeit möglich.
2. Nach der Ansage sprechen Sie den gewünschten Namen. Nach der Aufforderung wiederholen Sie den Namen. Sprechen Sie deutlich, aber so natürlich wie möglich. Wählen Sie dabei nicht zu kurze Namen, besonders bei ähnlich klingende Namen sollten Sie längere Varianten wählen, um eine bessere Erkennung zu gewährleisten.
3. AmpliTalk fragt Sie nun nach der Telefonnummer. Geben Sie diese über die Tasten ein und drücken dann die „#“-Taste (Raute). Sie können bis zu 45 Ziffern eingeben. Wenn Sie eine Pause in der Wiedergabe benötigen, z.B. bei bestimmten Services, können Sie dies durch zweimal Stern-Taste (*) bewirken; es wird dann eine Pause von 3 Sekunden eingefügt.
4. AmpliTalk liest nun die Nummer nochmals vor, um sicher zu stellen, dass die Eingabe korrekt war.
5. AmpliTalk fragt Sie nun automatisch nach dem nächsten Namen. Wenn Sie dies nicht wünschen, legen Sie einfach auf oder drücken die Raute-Taste (#), um zum Hauptmenü zurück zu kehren.

Die Kommandos (Ziffern) trainieren

1. Nehmen Sie sich etwas Zeit, in der in Ihrer Umgebung Stille herrscht. Das Training in ruhiger Umgebung führt zu hohen Erkennungsraten.
2. Nehmen Sie den Telefonhörer ab. Wenn Sie AmpliTalk bereits mit Namen trainiert haben, hören Sie nun „Den zu wählenden Namen bitte“. Drücken Sie die Raute-Taste (#) und Sie hören nun die Ansagen zum Hauptmenü. Drücken Sie die „5“ um die Kommandos (Ziffern) zu trainieren.
3. AmpliTalk fordert Sie nun auf die zehn Ziffern und „Stern“ zu sagen. Sie müssen jede Ziffer zwei mal sagen, anschließend wird Ihnen die Aufnahme nochmals vorgespielt. Dann geht es zur nächsten Ziffer.
4. Wenn alle Ziffern aufgenommen sind fordert AmpliTalk Sie auf, das Wahlkommando einzusprechen. Dieses Kommando kann jedes beliebige Wort sein, aber z.B. „Wähle Nummer“ ist immer gut.

Sprachgesteuertes Wählen

Es ist so einfach: Nehmen Sie den Telefonhörer ab und sagen Sie nach der Aufforderung den Namen, den Sie anrufen möchten. AmpliTalk wird nun die zugehörige Nummer wählen.

1. Nehmen Sie den Hörer ab. Wenn Sie AmpliTalk mit Namen trainiert haben, fragt AmpliTalk: „Den zu wählenden Namen bitte“. Wenn Sie nur Ziffern trainiert haben, fragt AmpliTalk nach der zu wählenden Nummer. An dieser Stellen sagen Sie den gewünschten Namen bzw. die erste Ziffer.
2. Wenn Sie einen Namen gesagt haben, wird AmpliTalk diesen wiederholen und dann die entsprechende Nummer wählen. Sollte AmpliTalk Sie nicht verstanden haben, fordert es Sie zur Wiederholung auf. Wenn Sie mehrfach nicht verstanden wurden, lesen Sie bitte zur Unterstützung im Kapitel 4 bei den „Häufigen Fragen und Antworten“ (FAQ) nach.
3. Wenn Sie eine Ziffer gesagt haben, wiederholt AmpliTalk diese und wartet auf die nächste Ziffer. Sagen Sie so alle Ziffern der gewünschten Telefonnummer. Wenn Sie damit fertig sind, sprechen Sie das Wahlkommando, also z.B. „Wähle Nummer“. Nun sagt AmpliTalk „wähle“ und wiederholt nochmals die Nummer. Prüfen Sie bitte, ob es wirklich die gewünschte Nummer ist. Bei Fehlern legen Sie einfach auf, ansonsten wählt AmpliTalk nun die Nummer.
4. Wenn Sie das Telefonat beendet haben, legen Sie bitte auf, so wie gewohnt.
5. Wenn Sie die gleiche Nummer nochmals wählen möchten, sagen Sie einfach das Wahlkommando erneut.

Bitte beachten Sie:

1. Sie können AmpliTalk jederzeit von Stromnetz trennen, ohne dass die Daten verloren gehen. Die Namen und Nummer sind fest gespeichert und Ihr Telefon arbeitet dann wie gewohnt weiter. Das gilt auch bei Stromausfall.
2. Um das Hauptmenü nach dem Training zu erreichen:
 - Nehmen Sie den Hörer ab
 - Drücken Sie die Raute-Taste (#)
3. Um eine Nummer manuell zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Nehmen Sie den Telefonhörer ab.
 - Drücken Sie eine beliebige Telefontaste, mit Ausnahme der Raute-Taste (#). AmpliTalk verbindet Sie direkt zur Telefonleitung und Sie können die Nummer direkt wählen.
4. AmpliTalk ist mit sprecherabhängiger Spracherkennungstechnologie

ausgestattet. Das bedeutet, dass nur die Person die AmpliTalk trainiert hat, dies auch nutzen kann. Trotzdem können mehrere Personen AmpliTalk trainieren und dann auch nutzen.

Löschen einer Nummer

Das Löschen einer Nummer / eines Namens kann auf zwei Arten erfolgen:

Methode 1:

1. Nehmen Sie den Hörer ab und Drücken dann die Raute-Taste (#) um ins Hauptmenü von AmpliTalk zu gelangen.
2. Drücken Sie die „2“, AmpliTalk fragt Sie nun nach dem zu löschendem Namen.
3. Wurde der Name gefunden, möchte AmpliTalk eine Bestätigung durch Drücken der Taste „5“. Jede andere Aktion unterbricht den Löschvorgang.
4. Drücken Sie die „5“ und der Eintrag wird gelöscht. AmpliTalk kehrt zum Hauptmenü zurück. Wenn dies der letzte Eintrag war, weist AmpliTalk Sie darauf hin und es ertönt zusätzlich ein Signalton.

Methode 2:

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie nach der Aufforderung zur Namenseingabe die Raute-Taste (#), um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Zifferntaste „4“. AmpliTalk beginnt die Liste der gespeicherten Namen vorzulesen.
3. Wenn Sie den zu löschenden Eintrag hören, drücken Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der Raute-Taste (#). AmpliTalk fordert Sie nun zur Bestätigung des Löschens mit der Zifferntaste „5“. Jede andere Aktion unterbricht den Löschvorgang.
4. Drücken Sie die „5“ und der Eintrag wird gelöscht. AmpliTalk kehrt zum Hauptmenü zurück. Wenn dies der letzte Eintrag war, weist AmpliTalk Sie darauf hin und es ertönt zusätzlich ein Signalton.

Alle Telefonnummern / Namen löschen

Warnung! Wenn Sie alle Einträge löschen, können Sie dies nicht wieder rückgängig machen. Vorsicht ist geboten!

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie nach der Aufforderung zur Namenseingabe die Raute-Taste (#), um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die „3“. AmpliTalk warnt Sie vor dieser Aktion.
3. Drücken Sie die Zifferntaste „9“, um das komplette Löschen zu bestätigen. Jede andere Aktion unterbricht den Löschvorgang.

4. Drücken Sie die „9“ und alle Einträge werden gelöscht. AmpliTalk kehrt zum Hauptmenü zurück. AmpliTalk weist Sie darauf hin, dass der Speicher leer ist und es ertönt zusätzlich ein Signalton.

Löschen der Kommandos

Bevor Sie die Kommandos / Ziffern neu trainieren können, müssen Sie diese löschen. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie nach der Aufforderung zur Namenseingabe die Raute-Taste (#), um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die „6“. AmpliTalk erwartet nun eine Bestätigung durch Drücken der Taste „5“. Die Ansage im deutschsprachigem Menü ist an dieser Stelle **falsch**, es sollte richtig heißen „Zum Löschen drücken Sie die 5“, wir bemühen uns dies zu korrigieren.
3. Drücken Sie die Zifferntaste „5“, um das komplette Löschen zu bestätigen. Jede andere Aktion unterbricht den Löschvorgang.

Wiedergabe aller gespeicherten Einträge

Sie können sich jederzeit alle Einträge, die im AmpliTalk gespeichert sind anhören. Gehen Sie wie folgt hierfür vor:

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie nach der Aufforderung zur Namenseingabe die Raute-Taste (#), um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Zifferntaste „4“. AmpliTalk beginnt die Liste der gespeicherten Namen vorzulesen. Drücken Sie die Raute-Taste (#) oder legen auf, um den Vorgang zu unterbrechen. Mit jeder anderen Taste können Sie den aktuellen Eintrag löschen (siehe Löschen einer Nummer / Methode 2)

Kapitel 3: weitere Funktionen

Das Kapitel Drei beschreibt wie Sie eine Nummer während eines Telefonats wählen können, erklärt die Arbeit mit der Freisprecheinrichtung und das Einstellen der Nutzersprache.

Arbeiten mit einer Telefonanlage

Es gibt Situationen, in denen der AmpliTalk nicht direkt an eine Telefonleitung, sondern an eine Nebenstellenanlage (Private Branch eXchange, PBX) angeschlossen ist, z. B. ein Pflegeheim. Um eine Amtsleitung zu erhalten, müssen Sie normalerweise eine Vorwahlziffer wählen, z. B. 9, bevor Sie die tatsächliche Nummer wählen. Wenn für alle

gespeicherten Nummern eine Vorwahlziffer festgelegt werden muss (z. B. beim Umzug von einem Privathaushalt in ein Pflegeheim), gehen Sie wie folgt vor:

- A) Nehmen Sie den Hörer ab. Wenn Namen gespeichert sind, fordert der AmpliTalk Sie auf, einen Namen zu wählen. Drücken Sie die Raute-Taste (#).
- B) Wenn Sie das Hauptmenü hören, drücken Sie die Taste '8'. Der AmpliTalk fordert Sie nun auf, die Ziffer einzustellen, die als Amtskennziffer dienen soll. Drücken Sie die gewünschte Ziffer. Um diese Funktion abzubrechen, drücken Sie die Sterntaste (*).

Menüsprache einstellen

Um die Menüsprache von Vocally einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Hörer ab und drücken dann die Raute-Taste (#), um in das Hauptmenü von AmpliTalk zu gelangen.
2. Drücken Sie die „0“, um ins Sprachauswahlmenü zu gelangen. AmpliTalk sagt Ihnen nun die verfügbaren Sprachen an.
3. Drücken Sie für „Deutsch“ die Zifferntaste „2“. AmpliTalk sagt „Vielen Dank“ und kehrt ins Hauptmenü zurück.

Kapitel 4: Speichertaste, Weiterleitung

In diesem Kapitel werden die weiteren Funktionen des Telefons, wie die Speichertasten und das Weiterleiten von Anrufen behandelt.

Taste: Redial / P (Redial / Pause)

Diese Taste befindet sich unter dem Ziffernblock ganz rechts. Mit dieser Taste kann die zuletzt gewählte Nummer automatisch erneut gewählt werden (maximale Kapazität sind 32 Stellen). Durch Drücken dieser Taste beim Wählen wird eine zeitgesteuerte Pause in den Wählvorgang eingefügt. Dies kann hilfreich sein, wenn eine Nummer auf einer Speichertaste gespeichert wird (siehe Abschnitt „Speichern einer Telefonnummer“).

Taste: PROG, Direktwahltasten M1, M2, M3

3 Nummern können in den Speichertasten M1, M2 und M3 gespeichert werden. Diese Tasten befinden sich oberhalb des Nummernfeldes. Um eine an einem dieser 3 Orte gespeicherte Nummer anzurufen, nehmen Sie einfach den Hörer ab und drücken Sie die Speichertaste. In jedem Speicher können bis zu 16 Ziffern gespeichert werden.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon von der Leitung trennen, werden die auf den Speichertasten gespeicherten Nummern gelöscht. Wenn Sie eine neue Nummer an einem Ort speichern, an dem bereits eine Nummer gespeichert ist, wird die zuvor gespeicherte Nummer automatisch gelöscht. Um einen Speicher zu löschen, ohne eine neue Nummer zu speichern, folgen Sie den hier genannten Anweisungen:

Speichern einer Nummer in einer Zielwahltaste

- A) Nehmen Sie den Hörer ab
- B) Drücken Sie die Taste PROG
- C) Geben Sie die zu speichernde Nummer ein (maximal 16 Stellen) und fügen Sie bei Bedarf jedes Mal eine zeitgesteuerte Pause ein (durch Drücken der Taste P), wenn ein Ton zu hören ist, bevor Sie den Wählvorgang fortsetzen (nützlich beim Wählen hinter einer TK-Anlage oder für Fernverkehrszugang zum Beispiel).
- D) Drücken Sie erneut die Taste PROG.
- E) Drücken Sie die Speichertaste, auf der diese Nummer gespeichert werden soll (M1, M2, M3).
- F) Hörer auflegen
- G) Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Zielwahltasten.

Anrufen einer in M1, M2 oder M3 gespeicherten Nummer

- A) Nehmen Sie den Hörer ab
- B) Drücken Sie M1, M2 oder M3. Die gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt.

Zwei Tasten Direktwahl-Speicher

10 Nummern können als Kurzwahlnummern in den Tasten 0 bis 9 gespeichert werden. Um eine in einer dieser 2-Tasten-Speichertasten gespeicherte Nummer anzurufen, nehmen Sie den Hörer ab, drücken Sie die Taste „MEMORY“ und eine der Ziffern Tasten (von 0 bis 9). Jede Taste kann eine Nummer mit bis zu 16 Ziffern speichern.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon von der Leitung trennen, werden die auf den Speichertasten gespeicherten Nummern gelöscht. Wenn Sie eine neue Nummer an einem Ort speichern, an dem bereits eine Nummer gespeichert ist, wird die zuvor gespeicherte Nummer automatisch gelöscht. Um einen Speicher zu löschen, ohne eine neue Nummer zu speichern, folgen Sie einfach dem Speichervorgang (siehe unten), ohne eine Nummer einzugeben.

Speichern einer Nummer in einer Two Touch-Speichertaste

- A) Nehmen Sie den Hörer ab
- B) Drücken Sie die Taste PROG
- C) Geben Sie die zu speichernde Nummer ein (maximal 16 Stellen) und fügen Sie bei Bedarf jedes Mal eine zeitgesteuerte Pause ein (durch Drücken der Taste P), wenn ein Ton zu hören ist, bevor Sie den Wählvorgang fortsetzen (nützlich beim Wählen hinter einer TK-Anlage oder zum Beispiel für den Zugang zu Ferndiensten)
- D) Drücken Sie erneut die Taste PROG
- E) Drücken Sie die Tastaturtaste (0 bis 9), in der diese Nummer gespeichert werden soll
- F) Hörer auflegen
- G) Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen One-Touch-Speichertasten

Anrufen einer in einer Two Touch-Taste gespeicherten Nummer

- A) Nehmen Sie den Hörer ab
- B) Drücken Sie die Taste „Memory“ und anschließend den Speicherplatz (0 bis 9), in dem die Nummer gespeichert wurde. Die Nummer wird automatisch gewählt.

Flash-Taste

Mit dieser Taste wird ein Anruf an eine andere Nebenstelle weitergeleitet, wenn der AmpliTalk hinter einer TK-Anlage angeschlossen ist.

Kapitel 5: Technische Daten

Kapitel 5 enthält technische Details, Hinweise und Garantieinformationen.

Technische Daten

Stromversorgung	12 Volt Steckernetzteil
max. Leistungsaufnahme	850 mW
Telefonanschluss	RJ11 / TAE (Deutschland)
Wahlmethode	DTMF
max. Anzahl Sprachwahl	45
Speichertyp	Flash
max. Zifferanzahl	45
Dauer der Sprachaufzeichnung	3 Sekunden
Gewicht	800 g
Maße	Hörer 6,7“ x 3,1“ x 5“ Basis 17,0 cm x 7,9cm x 12,7cm
Temperatur	0 – 70°
Prüfzeichen	FCC 15 & 68, CE, ROHGS, WEEE

Häufige Fragen und deren Antwort (FAQ)

F: AmpliTalk spricht mit mir in einer Fremdsprache. Wie kann ich wieder Deutsch einstellen?

A: Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie nach der Aufforderung die „#“-Taste (Raute), dann die „0“. Nun liest Ihnen AmpliTalk die verfügbaren Sprachen vor. Drücken Sie nun die Ziffer, die zu Ihrer Sprach gehört. Für Deutsch drücken Sie die „2“.

F: Wie kann ich eine Telefonnummer ohne Sprache wählen?

A: Nehmen Sie den Telefonhörer ab. Nach der Aufforderung „*Den zu wählenden Namen bitte*“ Drücken Sie eine beliebige Zifferntaste, z.B. die „0“. Sie hören nun das normale Freizeichen und können die Nummer eintippen.

F: Wenn ich einen neuen Namen trainieren möchte, höre ich immer wieder „Bitte wiederholen Sie“ und der Name wird nicht angenommen. Woran kann das liegen?

A: Stellen Sie sicher, dass Sie das Training in einer ruhigen Umgebung durchführen. Umgebungsgeräusche können zu Störungen führen.

F: AmpliTalk wählt die Nummer, aber ich bekomme keine Verbindung.

Was soll ich tun?

A: Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie nach der Aufforderung die „#“-Taste (Raute), dann die „8“. Legen Sie auf und versuchen es erneut.

Wichtige Hinweise

Wir haben uns größte Mühe gegeben, damit alle Informationen in diesem Handbuch korrekt wiedergegeben wurden. Trotzdem können sich zum Einen immer Fehler einschleichen und zum Anderen unterliegt das Produkt einer ständigen Weiterentwicklung, weshalb einige Werte leicht abweichen können. Der Hersteller, ActiVocal, garantiert nicht die vollständige Korrektheit dieses Handbuchs.

- Benutzen Sie das AmpliTalk nur in geschlossenen Räumen.
- Setzen Sie das AmpliTalk nicht plötzlichen Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus. Platzieren Sie das AmpliTalk nicht in der Nähe eines Heizkörpers und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Platzieren Sie dieses System nicht auf einer instabilen Oberfläche. Es könnte herunterfallen und somit zu Schäden an dem Gerät oder Verletzungen am Nutzer führen.
- Behandeln Sie das AmpliTalk mit Vorsicht. Eine grobe Handhabung führt zur Schädigung der internen Komponenten.
- Schalten Sie die Stromversorgung ab (Herausziehen des Steckernetzteils), wenn das Gerät längere Zeit nicht in Benutzung ist.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Stromversorgung.
- Nutzen Sie nur den mitgelieferten Stromadapter.
- Betreiben Sie die Einheit nicht unter 0° oder über +70° Celsius.

Benutzung des AmpliTalk auf andere Weise als in dieser Anleitung beschrieben, schließt die Garantie aus.

Vertrieb:

fluSoft GbR

Tannenstrasse 2

D 01099 Dresden, Deutschland

Tel.: +49/0 351-40457 0

Fax.: +49/0 351-40457 77

Web: <http://www.flusoft.de> <http://www.vocally.de>

WeChat-ID: flusoft

Email: info@flusoft.de info@vocally.de



Hersteller:

ActiVocal

4 Hayarden St., Yavne. P.O.Box 102

Rehovot 7610002

Israel

Tel: +972-8-6996910.

Web: <http://www.activocal.com>

DDV-241-001 REV.B

