

Aukey
Ulratragbare Video-Lupe
Benutzerhandbuch

Deutsch

Aumed[®]

Versionnummer_1.0(Deutsch Version)

Copyright 2010 by Aumed,

Alle Rechte vorbehalten

(Au100520)

Aumed[®]

Aumed Group Corp.

3/F Building D, No. 31 Jiaoda Dong Road,

Haidian District, Beijing 10044 China

Tel:86-10-8288 4173 Fax:86-10-8288 4170

Website: www.aumed.cn

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Einführung | 46 |
| Über diese Anleitung | 46 |
| 2. Sicherheit und Wartung | 46 |
| 3. Was ist in der Verpackung | 48 |
| 4. Kennenlernen Ihres Aukey | 49 |
| 5. Arbeit mit dem Gerät | 50 |
| Ein-/Ausschalten | 50 |
| Vergrößerungen | 51 |
| Betrachtungsmodi | 51 |
| Bild einfrieren | 52 |
| Abnehmbarer Ständer | 53 |
| Akkuanzeige | 53 |
| 6. Spezifikationen | 54 |
| 7. Gewährleistung | 54 |

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Aukey, eine ultraleichte elektronische Lupe von Aumed. Nutzen Sie das Aukey zum Lesen, Schreiben, Anschauen von Landkarten/Menüs/Quittungen und vielem mehr. Wir hoffen, dass Sie das Arbeiten mit Ihrem Aukey genießen.

Über diese Anleitung

Diese Anleitung bietet ausführliche Hinweise zu den Funktionen und Bedienschritten von der Aukey Video-Lupe. Abbildungen in dieser Anleitung können vom Original abweichen. Aumed behält sich alle Rechte für die Inhalte der Anleitung vor. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung von Aukey sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher für späteres Nachschlagen auf.

2. Sicherheit und Wartung

- Setzen Sie das Aukey nicht extremen oder

plötzlichen Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.

- Stellen Sie das Aukey nicht in der Nähe eines Heizkörpers auf und setzen Sie es nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Diese Situationen können zu Schäden an Elektronik und Optik des Aukey führen.
- Behandeln Sie das Aukey mit Vorsicht. Eine grobe Handhabung führt zur Schädigung der internen Komponenten.
- Entfernen Sie keine Komponenten von Aukey. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Aumed-Händler für die Wartungsarbeit wenn nötig.
- Öffnen Sie keine der Komponenten, da dies die Garantie verfallen lässt. Jede Komponente enthält Teile, die nur von einem Aumed Reparatur-Spezialisten gehandhabt werden sollten.
- Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel, da diese Ihr Gerät beschädigen können. Vermeiden Sie die Berührung der Kameralinse und halten Sie sie sauber mit einem weichen Tuch.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte

Stromadpter.

- Vermeiden Sie starke Vibration, harten Druck oder das Herunterfallen des Gerätes.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur unter +5°C (41F) oder über +40°C (104F) liegt.

Das Aukey darf nur so benutzt werden, wie in dieser Anleitung beschrieben.

3. Was ist in der Verpackung?

Die Aukey-Verpackung enthält folgende Komponenten:


- ① Die ultratragbare Aukey Video-Lupe
- ② Ein Stromadpter
- ③ Ein Armband
- ④ Ein abnehmbarer Ständer
- ⑤ Eine Bedienungsanleitung
- ⑥ Eine Schutztasche



Wenn eins dieser Teile vermisst wird, kontaktieren Sie Ihren lokalen Aumed-Händler.

4. Kennenlernen Ihres Aukey

Die folgende Abbildung zeigt die Hauptkomponenten von Aukey.

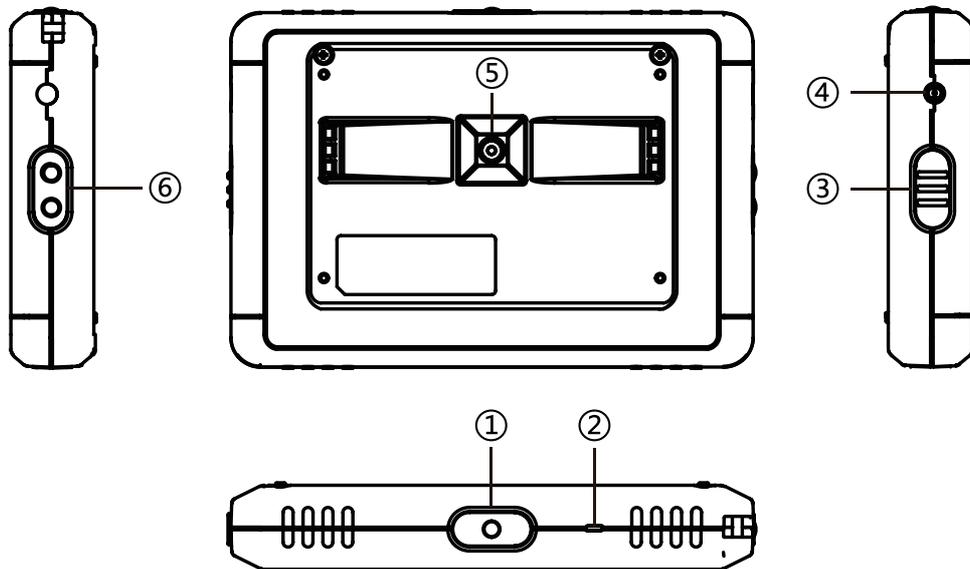

- ① Strom AN/AUS/ Betrachtungsmodi-Taste;
- ② Aufladenanzeige;
- ③ Einfrieren/Entfrieren-Modus-Taste;
- ④ DC-Eingang;
- ⑤ Zentralisierte Kamera;
- ⑥ Zoom-Taste;

5. Arbeit mit dem Gerät

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücken und halten Sie die  Taste für 4 Sekunden, um das Gerät einzuschalten;

Ausschalten: Drücken und halten Sie die  Taste erneut für 4 Sekunden, um das Gerät

auszuschalten.

Nach dem Einschalten des Gerätes wird der Betrachtungsmodus zuerst auf Echtfarb-Modus gesetzt. Für eine optimale Betrachtung halten Sie bitte einen Abstand zwischen dem Aukey und dem Lesegut von 1'' ein. Stellen Sie das Aukey NICHT direkt auf das gewünschte Objekt.

Vergrößerungen

Durch Drücken der  Taste können Sie zwischen zwei digitalen Vergrößerungsstufen wählen. Das gesamte Vergrößerungsbereich in Verbindung von optischer und digitaler Vergrößerung kann 1.5X-17X erreichen.

- Für eine optische Vergrößerung können Sie auch den Abstand zwischen der Kameralinse und dem Zielobjekt verändern.

Betrachtungsmodi

Drücken Sie die  Taste und wählen Sie verschiedene Farbmodi auf dem LCD-Bildschirm aus. Aukey stellt Ihnen drei verschiedene Farbmodi zur Verfügung:

- Echtfarb-Modus 

In diesem Modus werden Texte, Bilder und Objekte in Echtfarben angezeigt.

- Negativ-Lesemodus 

Dieser Modus dreht das Postivbild um. Bilder und Texte werden in Weiss auf schwarzem Hintergrund dargestellt.

- Positiv-Lesemodus 


Dieser Modus verstärkt die Vordergrund/Hintergrund-Kontrast. Bilder und Texte werden in Schwarz auf weissem Hintergrund dargestellt.

Bild einfrieren

- Drücken Sie die  Taste, um das aktuelle Bild einzufrieren. Damit erhalten Sie ein Standbild.
- Drücken Sie erneut diese Taste, um den Einfrieren-Modus zu beenden.
- Im Einfrieren-Modus kann man den Farbmodus auch ändern.

Abnehmbarer Ständer

Wenn Sie längere Zeit lesen möchten, benutzen Sie bitte den abnehmbaren Ständer.

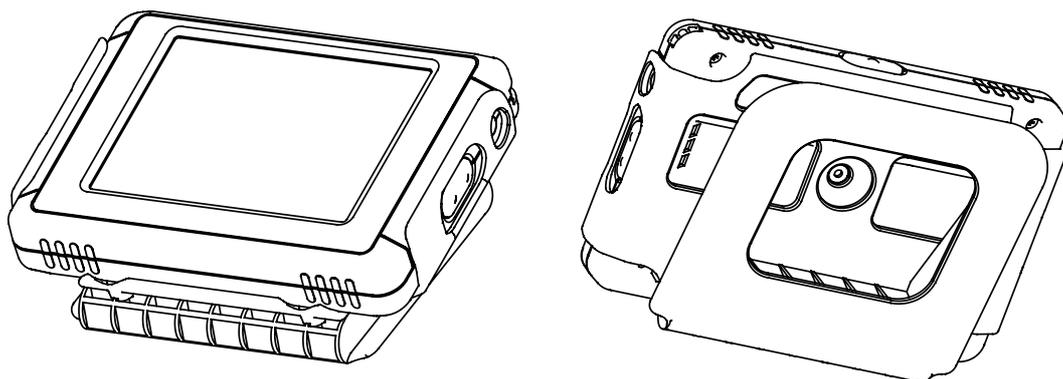

Nehmen Sie den Ständer während der Reise oder beim Einkaufen ab.

Akkuanzeige

Die LED-Lampe neben der Betrachtungsmodus-Taste ist die Akkuanzeige.

Anzeigenstatus:

- die blinkende rote Lampe bedeutet, dass der Akku geladen werden soll;
- die blinkende grüne Lampe bedeutet, dass der Akku im Ladevorgang ist. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Lampe automatisch.

6. Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--|
| Vergrößerungsbereich | 1.5X-17X |
| Vergrößerungsstufe | 2 Stufen |
| Betrachtungsmodi | 3 Farbmodi |
| Standbildframe | Ja |
| Schreibenfunktion | Ja |
| Li-ion-akku Kapazität | 1500mAh |
| Akkubetriebsdauer | 2.5 Stunden |
| Aufladendauer | 2.5-3 Stunden |
| LCD-Bildschirmabmessung | 3.5" TFT LCD |
| Maße | 105X72X17 mm 4.13X2.83X0.67 zoll |
| Gewicht | 120g (4Oz) |
| Stromadapter | 5V 1.5A |

7. Gewährleistung

Aumed übernimmt 1-jährige beschränkte Garantie ab ursprünglichem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sicher auf, der beim Garantieanspruch angefordert wird.

- Aumed wird das Gerät kostenlos reparieren

oder ersetzen, wenn das Problem durch defekte Teile verursacht ist (bei normaler Benutzung).

- Unsere Garantie deckt die folgenden Fälle NICHT ab (Für die anderen Bestimmungen und Bedingungen beziehen Sie sich bitte auf Klausel 2 Sicherheit und Wartung)
- Mutwillige Beschädigung oder Beschädigung, die durch übermäßige Krafteinwirkung verursacht ist, wird nicht von der Garantie abgedeckt.
- Benutzung des Gerätes unter extremen Bedingungen(z.B. unter übermäßiger Hitze) oder bei unsachgemäßer Verwendung entgegen den Anweisungen in der Bedienungsanleitung(z.B. Verwendung eines falschen Stromadpter wird auch nicht von der Garantie abgedeckt.
- Kratzer und Flecken bei normaler Benutzung sind Folge normaler Abnutzung und werden nicht von der Garantie abgedeckt .

Für jeglichen Grantieanspruch wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Aumed-Händler und liegen Sie bitte den datierten Kaufbeweis vor,

Aukey

Aumed

oder kontaktieren Sie uns unter [support@
umed.cn](mailto:support@umed.cn). Ihre Ansprüche werden innerhalb 48
Stunden beantwortet.

Ihrer Aukey-Händler:

