

FireCane

www.firecane.org



Gebrauchsanweisung

Stützstock mit Aufstehhilfe und LED Lampe

Artikelnummer: FTK4A068

Der klappbare Gehstock von FireCane ist der perfekte Alltagsbegleiter mit einer Vielzahl nützlicher Funktionen. Dieser Gehstock ist für Personen bis 115 Kg geeignet, in 5 Stufen bequem höhenverstellbar (86-97 cm) und misst im zusammengeklappten Zustand gerade einmal 30 cm, was den Transport im Gepäck oder an der mitgelieferten Trageschleife erleichtert. Die weiße Aluminiumlegierung und der rote Reflektorstreifen sorgen für optimale Sichtbarkeit. Mit der rutschfesten, 360° drehbaren 4-Fuß-Basis haben Sie sicheren Halt auf jeglichem Untergrund im Innen- und Außenbereich, selbst bei Nässe oder Glätte. Der ergonomische Kunststoffgriff liegt auch nach längerer Benutzung noch angenehm in der Hand und ein zusätzlicher, ausklappbarer Griff erleichtert das Aufstehen beispielsweise von Parkbänken oder dem Bett. Besonders praktisch ist auch das im Griff integrierte LED-Licht mit in 3 Stufen verstellbarem Winkel sowie ein Alarmknopf, um in Notfallsituationen auf sich Aufmerksam zu machen.

Wichtige Hinweise

Nur mit dem „www.firecane.org“ Aufkleber, der sich an unseren Stöcken befindet, haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Gehstock aus unserem Hause kommt. Nur so können Sie sich mit Garantieansprüchen an uns wenden. Sollten Sie diesen Aufkleber entfernen, erlischt die Garantie.

Auspacken

Auseinanderfalten von einzelnen Teilen:

- Streifen Sie die Gummischleife ab.
- Fassen Sie den Stock an seinem Griff und lassen die einzelnen Elemente nach unten gleiten.
- Schütteln Sie etwas am Griff damit sich die einzelnen Elemente besser verbinden.
- Das teleskopische Teil (oben) kann durch Drücken des Halteknopfs verstellt werden.

Verpacken

Bei Faltstöcken ist vor dem Verpacken das Zusammenfalten notwendig.

Zusammenfalten von einzelnen Teilen: (Faltstock)

- Ziehen Sie zwischen den ausgeklappten Elementen den Stock etwas auseinander und falten diese dann um.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Element.
- Fixieren Sie den zusammengeklappten Stock mit der Gummischleife.

Austausch der Batterien

- Schieben Sie den kleinen Riegel gegenüber der LED-Lampe am Griff nach oben, bis ein Klicken zu hören ist
- Entnehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien und schieben Sie, wie seitlich am Griff beschrieben, zwei neue AAA-Batterien jeweils mit dem zur Öffnung gerichteten Pluspol in den Griff
- Schließen Sie die Klappe, halten Sie sie kurz gedrückt und schieben Sie den Riegel wieder nach unten
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

LED-Licht / Sirene

An der Oberseite des Griffs befindet sich der Ein- / Ausschalter für das LED Licht. Der Lampenkopf lässt sich in 3 Stufen verstellen.

An der linken Seite des Griffs befindet sich der Ein- / Ausschalter für die Sirene. Die Sirene schafft Aufmerksamkeit.

Pflegehinweise

Die Klappenelemente werden bei faltstöcken und Kombistöcken durch zwei Gummilitzen fixiert. Achten Sie bitte darauf, dass beide Litzen so schnell wie möglich ausgetauscht werden, wenn diese beschädigt sind. Säubern Sie den Stock nur mit Wasser und etwas Spülmittel bzw. Allesreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ätzende Flüssigkeiten.

Garantiebestimmungen

Der Stock ist für eine Gebrauchsdauer von maximal einem Jahr konzipiert. Für diesen Zeitraum wird die gesetzliche Garantie gegeben.

Ausgeschlossen von dieser Gewährleistung sind folgende Verschleißteile:

- Batterien
- Gummilitzen
- Halteschlaufen
- Gebrauchsspuren an der Farbgebung

Ein Garantiewaivertritt tritt auch bei unsachgemäßem Gebrauch des Gehstocks in Kraft. Für Schäden, welche durch die Kanten des Stockes verursacht werden, wird keine Haftung übernommen.

Werden am Gehstock Veränderungen vorgenommen, z.B. durch das unsachgemäße Anbringen von Zusatzgeräten, kann die Garantie erlöschen.

Durch das An- und Durchbohren einzelner Elemente verliert der Stock seine Stabilität.

Sollte ein Garantie bzw. Reparaturfall auftreten, senden Sie uns bitte den Stock mit einer Rechnungs- bzw. Lieferscheinkopie zu. Möchten Sie eine Kleinreparatur selbst durchführen, können Sie sich von unseren Technikern jederzeit beraten lassen.

fluSoft GbR

Tannenstraße 2, 01099 Dresden

Tel.: 0351 40457 – 0

www.flusoft.de info@flusoft.de