

Orbit Reader 20

Kommandos

Orbit Reader 20

Kommandos

BHVD

Tannenstrasse 2

D 01099 Dresden

Tel: 0351 40457-75

Fax 0351 40457-75

info@bhvd.de

www.bhvd.de

info@orbitbraille.de

www.orbitbraille.de

Befehlsübersicht

System Hotkey

| | |
|---------------------|--|
| Gerät ein/aus | Drücken und Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 2 Sekunden, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. |
| Tastensperre an/aus | Drücken und Halten Sie Punkt 7 + Punkt 8 für 2 oder mehr als 2 Sekunden |
| Firmware Upgrade | Drücken und Halten Sie die rechten unteren Wipp-Taste + Punkt 5 + Punkt 8 (es kann dann einige Sekunden dauern bis der PC reagiert) |
| System Reset | Drücken und Halten Sie die rechte Cursor-Taste + Punkt 8 |
| System Soft Reset | Drücken und Halten Sie Punkt 3 + Ein/Aus Taste für 10 Sekunden |
| Ruhemodus | Kurzes Drücken der Ein/Aus Taste |

Hotkey zum Umschalten in den Remote Modus vom Stand-Alone Modus

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Verbinde als HID | Leer + Punkt 2 + Punkt 7 |
| Verbinde als Seriell | Leer + Punkt 3 + Punkt 7 |
| Verbinde als Bluetooth | Leer + Punkt 4 + Punkt 7 |
| Verbinde als Speichergerät | Leer + Punkt 5 + Punkt 7 |

Wechsle Modus

| | |
|--|------------------|
| Wechsle zum Remote Modus vom Stand-Alone Modus | Auswahl + Rechts |
| Wechsle zum Stand-Alone Modus vom Active/Inactive Remote Modus | Auswahl + Links |
| Wechsle zum Stand-Alone Modus vom Inactive Remote Modus | Punkt 7 |

Empfohlene Menü Navigation

| | |
|---|----------------------------|
| Menü öffnen | Auswahl + Cursor nach oben |
| Gehe zum nächsten Menüeintrag | Cursor nach unten |
| Gehe zum vorherigen Menüeintrag | Cursor nach oben |
| Gehe zum nächsten Menüauswahl für den aktuellen Eintrag | Cursor nach rechts |
| Gehe zum vorherigen Menüauswahl für | Cursor nach links |

| | |
|--|---------------------|
| den aktellen Eintrag | |
| Menü verlassen | Punkt 7 |
| Auswahl des Eintrags/Schließen des Hinweises | Auswahl |
| Menüanfang | Leer + Punkte 1 2 3 |
| Menüende | Leer + Punkte 4 5 6 |

Datei Manager

| | |
|--|---------------------------------|
| Gehe zur nächsten Datei-Eigenschaft | Wippschalter Links nach vorn |
| Gehe zur vorherigen Datei-Eigenschaft | Wippschalter Links nach hinten |
| Gehe zur nächsten Datei-Eigenschaft | Wippschalter Rechts nach vorn |
| Gehe zur vorherigen Datei-Eigenschaft | Wippschalter Rechts nach hinten |
| Gehe zum nächsten Ordner/zur nächsten Datei | Cursor nach unten |
| Gehe zum vorherigen Ordner/zur vorherigen Datei | Cursor nach oben |
| Gehe zur vorherigen Datei-Eigenschaft | Cursor nach links |
| Gehe zum nächsten Datei-Eigenschaft | Cursor nach rechts |
| Gehe zu einer Datei beginnend mit dem Zeichen | Punkt 3 |
| Gehe zu einer Datei beginnend mit dem Zeichen | Punkt 6 |
| Gehe zu einer Datei beginnend mit dem Zeichen | Punkt 2 |
| Gehe zu einer Datei beginnend mit dem Zeichen | Punkt 5 |
| Gehe eine Ebene zurück, Am Anfang mache nichts. In den Eigenschaften gehe zum Dateinamen | Punkt 7 |
| Öffne aktelle Datei/aktuellen Ordner | Punkt 8 |
| Gehe zu einer Datei beginnend mit dem Zeichen | Leer |
| Öffne aktelle Datei/aktuellen Ordner | Auswahl |

| | |
|--|---------------------------|
| Gehe zur ersten Datei | Leer + Punkte 1 2 3 |
| Gehe zur letzten Datei | Leer + Punkte 4 5 6 |
| Editiere aktuelle Datei | Leer + Punkte 1 5 |
| Editiere letzte Datei | Leer + Punkte 1 2 4 6 |
| Markiere aktuelle Datei | Leer + M (Punkte 1 3 4) |
| Erstelle neue Datei | Leer + N (Punkte 1 3 4 5) |
| Erstelle neuen Ordner | Leer + O (Punkte 1 3 5) |
| Lösche Datei | Leer + D (Punkte 1 4 5) |
| Benenne Datei um | Leer + R (Punkte 1 2 3 5) |
| Schneide Datei aus | Leer + X (Punkte 1 3 4 6) |
| Kopiere Datei | Leer + C (Punkte 1 4) |
| Einfügen | Leer + V (Punkte 1 2 3 6) |
| Datei Schreibschutz ein/aus | Leer + P (Punkte 1 2 3 4) |
| Springe zu einer Datei beginnend mit dem Zeichen | beliebiges Zeichen |

Datei Reader Navigation

| | |
|---|---------------------------------|
| Gehe zur nächsten Zeichenfolge, die auf die Anzeige passt | Wippschalter Links nach vorn |
| Gehe zur vorherigen Zeichenfolge, die auf die Anzeige passt | Wippschalter Links nach hinten |
| Gehe zur nächsten Zeichenfolge, die auf die Anzeige passt | Wippschalter Rechts nach vorn |
| Gehe zur vorherigen Zeichenfolge die auf die Anzeige paßt | Wippschalter Rechts nach hinten |
| Gehe zum nächsten Absatz | Cursor nach unten |
| Gehe zum vorherigen Absatz | Cursor nach oben |
| Bewege das vorherige Zeichen in den Anzeigebereich | Cursor nach links |
| Bewege das nächste Zeichen in den Anzeigebereich | Cursor nach rechts |
| Seite oder 60 Zeilen zurück | Punkt 3 |

| | |
|---|------------------------------|
| Seite oder 60 Zeilen vor | Punkt 6 |
| Gehe zum vorherigen Lesezeichen | Punkt 2 |
| Gehe zum nächsten Lesezeichen | Punkt 5 |
| Gehe zum Dateianfang | Punkt 1 |
| Gehe zum Dateiende | Punkt 4 |
| Beenden und zur Ansicht der Ordneigenschaften gehen | Punkt 7 |
| Bewege das vorherige Wort in den Anzeigebereich | Leer + Cursor nach links |
| Bewege das nächsten Wort in den Anzeigebereich | Leer + Cursor nach rechts |
| Vorherige binäre Suche | Punkt 8 + Cursor nach oben |
| Nächste binäre Suche | Punkt 8 + Cursor nach unten |
| Vorheriges Suchergebnis | Punkt 8 + Cursor nach links |
| Nächstes Suchergebnis | Punkt 8 + Cursor nach rechts |
| Bewege das nächste Wort in den Anzeigebereich | Leer + Punkt 5 |
| Bewege das vorherige Wort in den Anzeigebereich | Leer + Punkt 2 |
| Gehe zum vorherigen Absatz | Leer + Punkt 1 |
| Gehe zum nächsten Absatz | Leer + Punkt 4 |
| Bewege das vorherige Zeichen in den Anzeigebereich | Leer + Punkt 3 |
| Bewege das nächste Zeichen in den Anzeigebereich | Leer + Punkt 6 |
| Dateianfang | Leer + Punkte 1 2 3 |
| Dateiende | Leer + Punkte 4 5 6 |
| Editiere aktuelle Datei | Leer + Punkte 1 5 |
| Gehe zur letzten bearbeiteten Datei | Leer + Punkte 1 2 4 6 |
| Setze/Lösche Markierung | Leer + M (Punkte 1 3 4) |
| Öffne neue Datei | Leer + N (Punkte 1 3 4 5) |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Öffne Suchfeld | Leer + F (Punkte 1 2 4) |
|----------------|-------------------------|

Editierfeld

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Absatz nach unten | Cursor nach unten |
| Absatz nach oben | Cursor nach oben |
| Cursor nach Links | Cursor links |
| Cursor nach Rechts | Cursor rechte |
| Eingabe | Punkt 3 |
| Eingabe | Punkt 6 |
| Eingabe | Punkt 2 |
| Eingabe | Punkt 5 |
| Eingabe | Punkt 1 |
| Eingabe | Punkt 4 |
| Rückschritt | Punkt 7 |
| Eingabetaste | Punkt 8 |
| Eingabe | Leer |
| Verlassen | Auswahl |
| Cursor zum vorherigen Wort | Leer + Cursor nach links |
| Cursor zum nächsten Wort | Leer + Cursor nach rechts |

Datei Editor

| | |
|---|---------------------------------|
| Gehe zur nächsten Zeichenfolge, die auf die Anzeige passt | Wippschalter Links nach vorn |
| Gehe zur vorherigen Zeichenfolge, die auf die Anzeige passt | Wippschalter Links nach hinten |
| Gehe zur nächsten Zeichenfolge, die auf die Anzeige passt | Wippschalter Rechts nach vorn |
| Gehe zur vorherigen Zeichenfolge, die auf die Anzeige passt | Wippschalter Rechts nach hinten |
| Gehe zum nächsten Absatz | Cursor nach unten |
| Gehe zum vorherigen Absatz | Cursor nach oben |
| Cursor Links | Cursor nach links |

| | |
|---|-------------------------------|
| Cursor Rechts | Cursor nach rechts |
| Eingabe | Punkt 3 |
| Eingabe | Punkt 6 |
| Eingabe | Punkt 2 |
| Eingabe | Punkt 5 |
| Eingabe | Punkt 1 |
| Eingabe | Punkt 4 |
| Rückschritt | Punkt 7 |
| Eingabetaste | Punkt 8 |
| Eingabe | Leer |
| Editor Context-Menü | Auswahl |
| Cursor auf Wortanfang des vorherigen Wortes | Leer + Cursor nach links |
| Cursor auf Wortanfang des nächsten Wortes | Leer + Cursor nach rechts |
| Vorheriges Suchergebnis | Punkt 8 + Cursor nach links |
| Nächstes Suchergebnis | Punkt 8 + Cursor nach rechts |
| Absatzbeginn | Leer + 7 + Cursor nach links |
| Absätze nde | Leer + 7 + Cursor nach rechts |
| Seite zurück | Leer + 7 + Cursor nach oben |
| Seite vor | Leer + 7 + Cursor nach unten |
| Einfügen eines Zeichens am Cursor | beliebiges Zeichen |

Kontext Menü

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Öffne Context Menü | Auswahl |
| Gehe zum nächsten Menü Eintrag | Cursor nach unten |
| Gehe zum vorherigen Menü Eintrag | Cursor nach oben |
| Verlassen | Punkt 7 |
| Auswahl des Eintrag | Auswahl |

Lokalisation

| | |
|------------------|--------------------------|
| Lade locale | Leer + Punkt 8 + Punkt 1 |
| Lade nur .loc | Leer + Punkt 8 + Punkt 2 |
| Lade nur .lan | Leer + Punkt 8 + Punkt 3 |
| Wechsle locale | Leer + Punkt 8 + Punkt 4 |
| Wechsle nur .loc | Leer + Punkt 8 + Punkt 5 |
| Wechsle nur .lan | Leer + Punkt 8 + Punkt 6 |
| | |

BHVD

Tannenstrasse 2

D 01099 Dresden

Tel: 0351 40457-75

Fax 0351 40457-75

info@bhvd.de

www.bhvd.de

info@orbitbraille.de

www.orbitbraille.de