

# Elektronische Lupe

## *HANDBUCH*



## Vertrieb:



***fluSoft GbR***

Tannenstraße 2  
D 01099 Dresden

Tel: 0351 404570  
Fax: 0351 4045777  
Web: <http://www.flusoft.de>  
Email: [info@flusoft.de](mailto:info@flusoft.de)



**Inhaltsverzeichnis**

Vertrieb:.....	1
1. Einführung.....	3
1.1. Herzlichen Glückwunsch.....	3
1.2. Über diese Anleitung.....	3
2. Sicherheit und Wartung.....	4
3. Gewährleistung.....	5
4. Packungsinhalt.....	6
5. Eigenschaften.....	6
6. Bedienung.....	7
7. Akku laden.....	8
8. Schreiben mit der EasyView 4.3L.....	8
9. Geräteansicht .....	9
10. Anschluss an einen Monitor.....	9

# **1. Einführung**

## **1.1. *Herzlichen Glückwunsch***

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl der EasyView 4.3L, einer sehr leichten elektronische Lupe. Nutzen Sie die EasyView 4.3L zum Lesen, Schreiben, Anschauen von Landkarten / Menüs / Preisschildern und Vielem mehr. Wir hoffen, dass Sie das Arbeiten mit Ihrer EasyView 4.3L genießen werden.

## **1.2. *Über diese Anleitung***

Diese Anleitung bietet ausführliche Hinweise zu den Funktionen und Bedienschritten der EasyView 4.3L, elektronische Lupe. Abbildungen in dieser Anleitung können vom Original abweichen. Wir behalten uns alle Rechte für die Inhalte der Anleitung vor. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung der EasyView 4.3L sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher für späteres Nachschlagen auf.

## 2. Sicherheit und Wartung

- Setzen Sie die EasyView 4.3L nicht extremen oder plötzlichen Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie die EasyView 4.3L nicht in der Nähe eines Heizkörpers auf und setzen Sie sie nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Diese Situationen können zu Schäden an Elektronik und Optik der EasyView 4.3L führen.
- Behandeln Sie die EasyView 4.3L mit Vorsicht. Eine grobe Handhabung führt zur Schädigung der internen Komponenten.
- Entfernen Sie keine Komponenten der EasyView 4.3L. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler für die Wartungsarbeit, wenn nötig.
- Öffnen Sie keine der Komponenten, da dies die Garantie verfallen lässt. Jede Komponente enthält Teile, die nur von einem Reparatur-Spezialisten gehandhabt werden sollten.
- Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Berührung der Kameralinse und halten Sie sie mit einem weichen Tuch sauber.
- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Stromadapter.
- Vermeiden Sie starke Vibrationen, harten Druck oder das Herunterfallen des Gerätes.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur unter +5°C oder über +40°C liegt.
- Die EasyView 4.3L darf nur so benutzt werden, wie in dieser Anleitung beschrieben wird.

### 3. Gewährleistung

Wir übernehmen die jeweils geltende gesetzlich vorgeschriebene Garantie ab dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sicher auf, der beim Garantieanspruch angefordert wird.

- Wir werden das Gerät kostenlos reparieren oder ersetzen, wenn das Problem durch defekte Teile verursacht ist (bei normaler Benutzung).
  
- Unsere Garantie deckt die folgenden Fälle **NICHT** ab (Für die anderen Bestimmungen und Bedingungen beziehen Sie sich bitte auf Klausel 2 Sicherheit und Wartung)
  1. Mutwillige Beschädigung oder Beschädigung, die durch übermäßige Krafteinwirkung verursacht ist wird nicht von der Garantie abgedeckt.
  2. Benutzung des Gerätes unter extremen Bedingungen (z.B. bei übermäßiger Hitze) oder bei unsachgemäßer Verwendung **e n t g e g e n** den Anweisungen in der Bedienungsanleitung (z.B. Verwendung eines falschen Stromadapters) wird ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.
  3. Kratzer und Flecken bei normaler Benutzung sind Folge normaler Abnutzung und werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Für jeglichen Garantieanspruch wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler und legen Sie bitte den datierten Kaufnachweis vor.

## 4. Packungsinhalt

Die EasyView 4.3L Verpackung enthält folgende Komponenten:




- Lupe
- Handbuch
- Netzkabel
- Schutzhülle
- Reinigungstuch
- Handschlaufe
- TV-Kabel (optional)

## 5. Eigenschaften

- Displaygröße 4,3 Zoll TFT LCD
- Auflösung QVGA
- Kontrast 16 Stufen
- Vergrößerung 2 - 16 fach
- Display Modus Vollfarbe, Schwarz/Weiß, Invers, Gelb/Schwarz, Gelb/Blau, Blau/Gelb, Blau/Weiß, Gelb/Schwarz
- Akkulaufzeit max. 4 Stunden, 6 h Ladezeit
- Laden über Netzteil
- Netz 3,7V/1500mA (max.)
- Maße 258 x 88 x 25 mm
- Gewicht 192 g
- Zusatz TV-Out (PAL)

## 6. Bedienung


Halten Sie die EasyView 4.3L bitte so, dass der Einschalter auf der linken Seite (oben) ist.

- Schalten Sie den Einschalter durch Drücken von ca. 1 Sekunde ein, das Gerät geht erst nach dem Loslassen dieses Tasters an! Zum Ausschalten drücken Sie diesen Taster für ca. 2 Sekunden und lassen ihn los. Das Display wird dunkel und nach kurzer Zeit erlischt auch das LED-Licht.
- Die Beleuchtungs-LEDs schalten sich ein und nach ca. 1,5 Sekunden erscheint das Bild auf dem Display.
- Halten Sie die Kamera über das Objekt, welches Sie betrachten möchten.
- Drücken Sie den Modusknopf, um zwischen den unterschiedlichen Farbmodi umzuschalten. Der Modusknopf ist der große, mittlere, blaue Knopf auf der rechten Seite. 
- Drücken Sie den Knopf für die Vergrößerung, um die Vergrößerungsstufe auszuwählen. Der Vergrößerungsknopf ist der oberste, gelbe Knopf auf der rechten Seite. 
- Drücken Sie den Play/Stop-Knopf für das Standbild (Bild einfrieren). Dieser Knopf befindet sich unten auf der rechten Seite. 

Durch nochmaliges Drücken dieses Knopfes verlassen Sie den Einfriermodus wieder.

Die Vergrößerungseinstellungen können auch im Modus „Standbild“ vorgenommen werden.


## 7. Akku laden

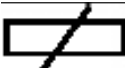- Dieses Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer Akku ausgestattet. (BP-4L)  
Damit können Sie mit diesem Gerät bis zu 4 Stunden hintereinander arbeiten.
- Bei niedriger Akkuladung erscheint im Display  unten links ein Batterie Symbol.
- Schalten Sie das Gerät zum Laden immer aus! Der Akku wird bei eingeschaltetem Gerät nicht sicher geladen.
- Zum Laden des Akkus stecken Sie das Netzkabel in die Ladebuchse (Mini-USB) des Gerätes an der unteren Seite. Eine rote Ladekontrolllampe leuchtet auf.  
Nach 5 bis 6 Stunden ist das Gerät vollständig geladen und die Lampe leuchtet grün.

## 8. Schreiben mit der EasyView 4.3L


Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich der Schreibfuß, den Sie zum Schreiben heraus klappen können.

(Bild vom Vorgängermodell)

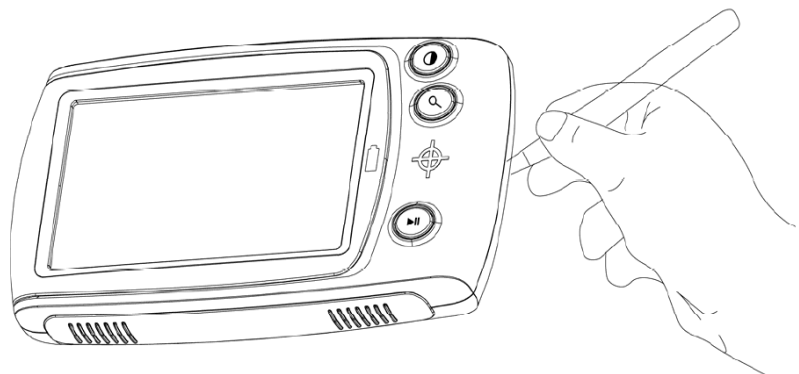



## 9. Geräteansicht

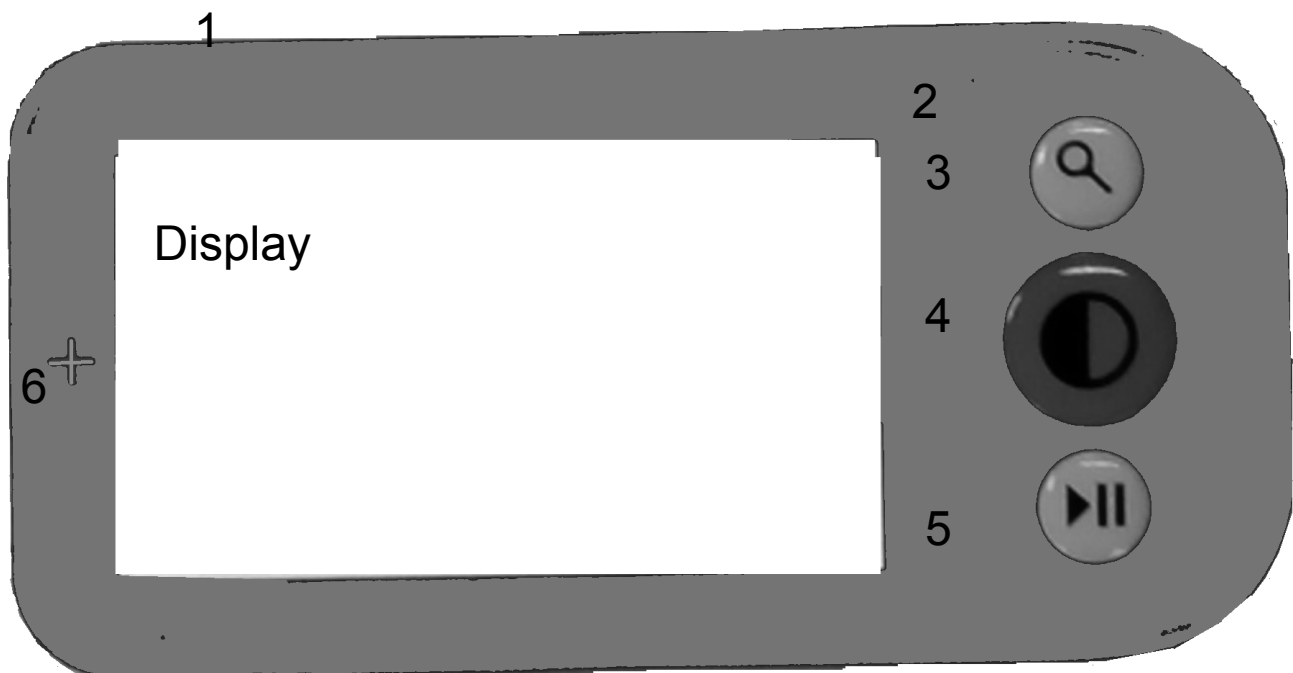

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 1 Ein-/Austaster | 6 Kameraposition       |
| 2 Lade LED       | 7 Ladebuchse MINI-USB  |
| 3 Vergrößerung   | 8 TV-Out               |
| 4 Farbmode       | 9 Öse für Handschlaufe |
| 5 Standbild      | Fuß an der Rückseite   |

## 10. Anschluss an einen Monitor

Wenn Sie Ihre EasyView 4.3L an einen Monitor (z.B. TV-Gerät) anschließen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stecken Sie den Klinenstecker des mitgelieferten Videokabels in die Videobuchse (8) der EasyView 4.3L
- Verbinden Sie den Cinch-Stecker mit dem Videoeingang (gelbe Buchse) Ihres Monitors.
- Wählen Sie an Ihrem Monitor die entsprechende Videoquelle.