

Jot a Dot

Bedienungsanleitung



Quantum Technology Pty Ltd
Postkasten: PO Box 390
Straße: 5 South Street
Rydalmere NSW 2116 Australia
Telefon: (+61 2) 8844 9888
Fax: (+61 2) 9684 4717
Email: info@quantumtechnology.com.au
Webseite: www.jotadot.com
www.quantumtechnology.com.au

© Quantum Technology Pty Ltd

Vertrieb in Deutschland:



fluSoft

Spezial - Computer - Technik

Tannenstrasse 2
D 01099 Dresden

Tel. 03 51 / 404 57-0
Fax 03 51 / 404 57-77
eMail info@flusoft.de
<http://www.fluSoft.de>

Inhaltsverzeichnis

Inhalt der Jot a Dot Verpackung.....	2
Holen Sie das Beste aus Ihrem Jot a Dot heraus.....	2
Lernen Sie Ihren Jot a Dot kennen.....	3
Die sechs Gesichter des Jot a Dot.....	3
Die Funktionen von Jot a Dot.....	3
Oberseite:.....	3
Unterseite:.....	4
.....	4
Vorderseite:.....	4
Rückseite:.....	4
Vorbereitung des Jot a Dot.....	5
Papier einlegen.....	5
Punkte setzen – schreiben mit Jot a Dot.....	6
Die Scheibposition.....	6
Braille erstellen.....	6
Ihre Braille lesen.....	6
Hilfreiche Tipps.....	7
Jot a Dot Wartung.....	7
Garantie Voraussetzungen.....	8
GARANTIE und SERVICE SUPPORT.....	8

Inhalt der Jot a Dot Verpackung

- JOT A DOT Druckeranleitung
- JOT A DOT Braille-Anleitung (engl.)
- JOT A DOT CD Rom
- Notizheft von Jot a Dot Papier
- Jot a Dot Braillabel Ettikettenbeispiele
- Jot a Dot Transporttasche
- Umhängeschlaufe

Holen Sie das Beste aus Ihrem Jot a Dot heraus

Jot a Dot ist ein revolutionäres, taschengroßes Braillegerät, entwickelt für die Verwendung mit normalem Notizpapier, es wird empfohlen dass nur Papier mit dem Jot a Dot verwendet wird, das folgende Eigenschaften aufweist.

Notizpapier

Papiergröße: A6 (A4 geviertelt)
Gewicht: 80 g/m²
Breite: 148mm
Länge: 105mm

ODER

US Brief Papier (geviertelt)
Gewicht: 20-22 Pfund;
Breite: 5.51"
Länge: 4.25"

Jot a Dot kann mit Etiketten verwendet werden wie das mitgelieferte Beispiel aus der Verpackung zeigt.




Warnung: schweres Papier wie Karten oder dicke Etiketten werden nicht empfohlen und können Komponenten des Jot a Dot beschädigen, was die Lebenszeit des Gerätes verkürzt.

Lernen Sie Ihren Jot a Dot kennen

Die sechs Gesichter des Jot a Dot

Wenn Sie sich mit den sechs Gesichtern des Jot a Dot vertraut gemacht haben, werden Ihnen die jeweiligen Funktionen bei der Orientierung helfen, wenn Sie Papier einlegen und das Braille lesen.

Legen Sie Ihr Jot a Dot auf eine flache Oberfläche, mit dem grünen Drehknopf auf der linken Seite. Die sechs Hauptseiten sind:

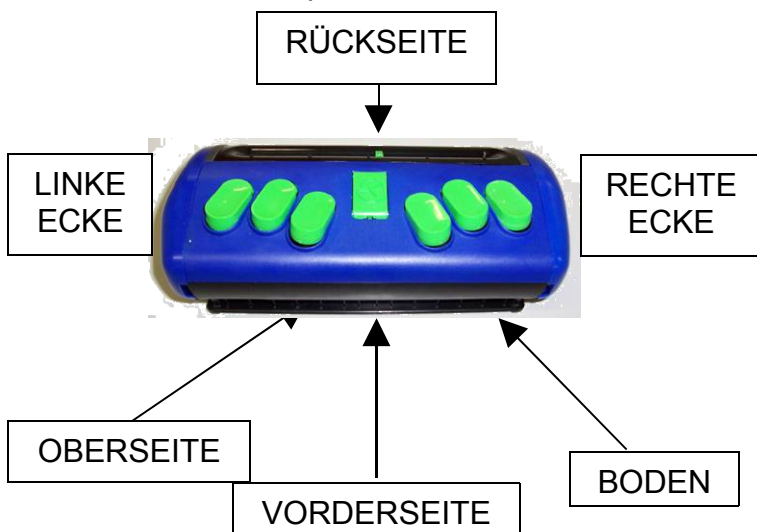

Oberseite – mit Braille-Tastatur; (blau)

Boden - Unterseite; (schwarz)

Vorderseite – die schräge Ecke auf Sie gerichtet;

Rückseite – die schräge Ecke weg von Ihnen;

Linke Ecke - Linke Seite mit herausstehendem grünen Drehknopf;

Rechte Ecke – Rechte Seite mit Zeilenzeiger;

Legen Sie Ihre Finger auf die Tasten der Brailletastatur und drücken Sie sanft drauf. Sie werden spüren wie sich die gesamte Oberfläche des Jot a Dot nach unten bewegt, um die Lücke

zwischen Ober- und Unterseite zu schließen. So erzeugt das Jot a Dot Braille.

Die Funktionen von Jot a Dot

Nun da Sie die sechs Seiten kennen, lassen Sie uns die Funktionen dieser "Gesichter" näher betrachten.

Oberseite:


Drucktasten – gebogene Reihe von sechs grünen Brailletasten;

Weiter entfernt von Ihnen:

Lesestandfuß – grüner Vorsprung zur Stütze des Jot a Dot bei einlegen von Papier oder beim lesen;

Schreiblineal – Gut fühlbares Taktillineal zum Auffinden der aktuellen Braillezelle;

Zellen-Zeiger – grüner Zeiger der sich nach rechts bewegt sobald eine Zelle beschrieben wurde und wird manuell nach links zurück gesetzt. Entspricht der aktuellen Zelle gemessen am Taktillineal.

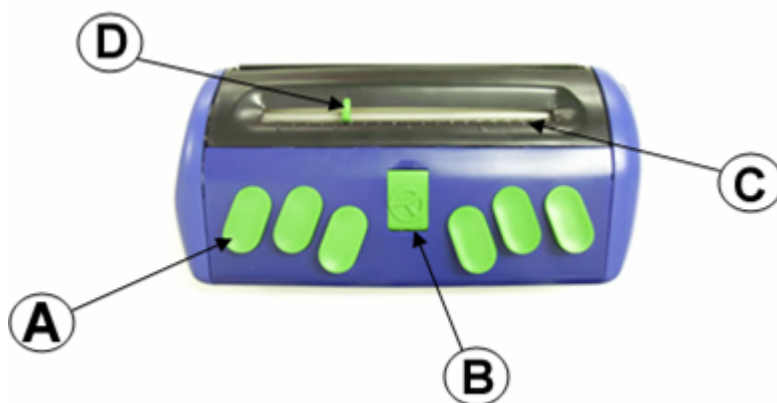

- A. Drucktasten
- B. Lesestandfuß
- C. Schreiblineal
- D. Zellen-Zeiger

Unterseite:

Drehen Sie den Jot a Dot um, sodass der grüne Drehknopf (Papierwinde) noch auf der linken Seite ist.

Zu Ihnen hin:

Papierablage – einstellbare Schräge zur Ablage des Papiers nach Bedarf;


Führleiste – unter der Papierablage wird hier das Papier beim einlegen geführt;

Papiereinschub – die Öffnung unter der Papierablage in die das Papier eingedreht wird;

Leselineal – Fühlbares Taktillineal zum identifizieren der aktuellen Zelle;


Unterseitenbefestigung – angebracht an beiden Vorderseiten der Unterseite. Nur zur Wartung des Jot Dot benötigt.

- E. Papierablage
- F. Führleiste
- G. Papiereinschub
- H. Leselineal
- I. Unterseitenbefestigung

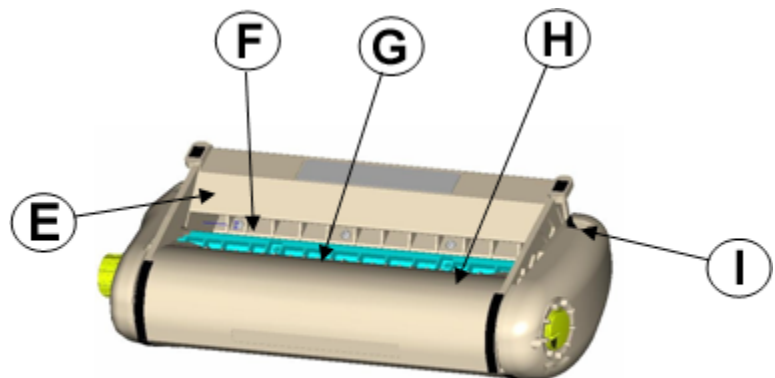

Vorderseite:

Umhängegurtbefestigung – zu finden an der linken und rechten Seite. Zum Befestigen oder Abnehmen des Umhängegurtes.

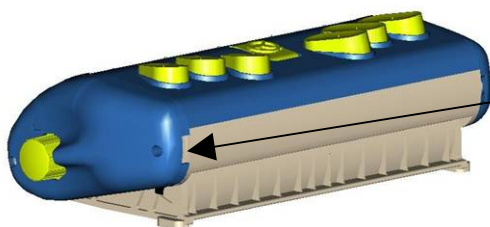


J

J. Gurtbefestigung

Rückseite:

Papierausgangsöffnung – durch die das Papier ausgegeben wird nachdem es eingelegt wurde.

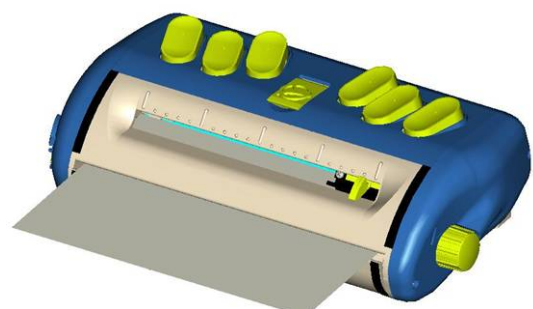

Linke Ecke:


Papierwinde – runder grüner Drehknopf zum Auf- und Abrollen des Papiers aus dem Jot a Dot;

Richtungspfeil – direkt über dem Drehknopf zu finden. Hilft die Drehrichtung zu bestimmen.

- L. Papierwinde
- M. Richtungspfeil

M


L

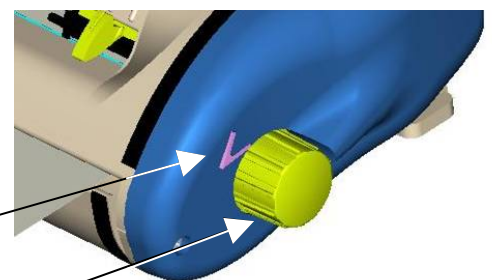

Rechte Ecke:

Zeilenzeiger – Auswahl mit einem mitdrehenden Zeiger. Wenn die Papierwinde gedreht wird, dreht der Zeiger mit um jede neue Zeile anzuzeigen.

Merke: es ist hilfreich mit diesem Zeiger zu experimentieren um das Einlegen des Papiers zu üben.

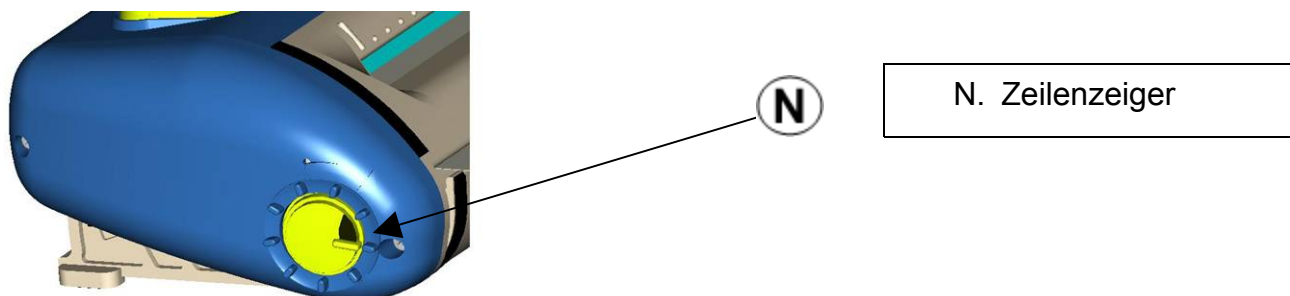

Vorbereitung des Jot a Dot

Um Papier einzulegen, muss das Jot a Dot in der Lese-Position sein (Tasten nach unten).

1. Mit dem Finger oder Fingernagel den Lesestandfuß in die aufrechte Position bringen;
2. Drehen Sie das Jot a Dot um indem Sie es hochheben und es von sich weg drehen, hierbei bleibt die Papierwinde auf der linken Seite;
3. Stellen Sie sicher dass das Jot a Dot sicher mit dem Lesestandfuß positioniert ist. Sie haben nun die Papierablage und den Papiereinschub vor sich. Die Drucktasten und Oberseite des Jot a Dot liegen nun unten und sind von Ihnen abgewendet.

Vorschlag: machen Sie sich mit dieser Position vertraut, bei beachten der sechs Oberflächen des Jot a Dot. Dies hilft bei der schnellen Benutzung.

Papier einlegen

1. Nehmen Sie ein Blatt Papier von den passenden Notizpapier;
2. Führen Sie das Papier auf die Papierablage. Stellen Sie sicher dass die lange Seite horizontal liegt, und die kürzere vertikal; (auch als Landschaftslage bekannt)
3. Stellen Sie sicher dass das Papier die Führleiste abdeckt und die Unterseite des Papiers richtig in den Papiereinschub passt;



Abbildung: Papier einlegen

Tip: wenn Sie die Hand vom Papier nehmen und es sich nicht bewegt ist es in der richtigen Lade-Position;

4. Drehen Sie die Papierwinde gegen den Uhrzeigersinn. Halten Sie einen Finger leicht gegen das Papier auf der Papierablage um sicher zu stellen dass es sicher mitrollt.
5. Die untere Ecke des Papiers wird herausgeschoben durch die Papierausgangsöffnung;
6. Drehen Sie so lange bis die obere Ecke des Papiers an der Führleiste unter der Papierablage anliegt. Der größere Teil des Papiers schaut nun aus der Papierausgangsöffnung und ist fertig eingelegt.



Merke: drehen Sie das Papier nicht weiter als bis zur Führleiste, sonst sitzt es fest.

7. Drehen Sie Jot a Dot zu Ihnen hin bis die Unterseite wieder flach aufliegt
8. Der Zeilenzeiger befindet sich auf der rechten Ecke des Jot a Dot; Drehen Sie den Zeiger zur horizontalen 12 Uhr Position. Beim Lesen und Schreiben hilft Ihnen dies zu merken auf welcher Zeile Sie sich befinden.
9. Stellen Sie sicher dass der Zellenzeiger ganz links steht. Er kann mit einem Finger einfach verschoben werden. Jetzt ist das Jot a Dot bereit;

Punkte setzen – schreiben mit Jot a Dot

Die Scheibposition

- 1) Legen Sie Ihre Finger auf die Tasten während Jot a Dot auf einer flachen Oberfläche aufliegt;
- 2) Bringen Sie nun beide Daumen zu sich auf die Unterseite des Jot a Dot;
- 3) Halten Sie Ihre Daumen in dieser Position und stellen Sie das Jot a Dot auf (weg von sich) bis seine Rückseite flach aufliegt und die Unterseite zu Ihnen zeigt. Ihre Finger liegen immer noch auf den Tasten;

Merke: an der Rückseite des Jot a Dot sind Gummifüße die es davon abhalten zu rutschen;

- 4) Jot a Dot sollte nun in einer fast aufrechten Position sein mit Ihren Daumen auf der Unterseite und Ihren Fingern auf den Tasten;

Braille erstellen

- 1) Wählen Sie die Punkte einer Zelle die Sie schreiben möchten indem Sie die passenden Tasten dafür drücken;
- 2) Schließen Sie das Jot a Dot indem Sie die Daumen und Finger beider Hände benutzen und die Ober- und Unterseite des Jot a Dot zusammendrücken;

Merke: Für beste Resultate drücken Sie fest zu. Es ist ebenfalls wichtig beide Hände zu nutzen um das Jot a Dot zu schließen, auch wenn nur Tasten auf einer Seite gedrückt werden.

Abbildung: Brailen mit Jot a Dot



- 3) Sie werden einen Widerstand spüren sobald das Jot a Dot vollständig geschlossen ist. Um es wieder zu öffnen, geben Sie weniger Druck bis das Jot a Dot von selber aufspringt.
- 4) Um ein Leerzeichen oder eine leere Zelle zu erzeugen, drücken Sie einfach das Jot a Dot zusammen ohne eine Taste mit zu drücken;
- 5) Das Jot a Dot schreibt 20 Zeichen auf eine Zeile. Nutzen Sie den Zellenzeiger um festzustellen ob Sie bald das Ende einer Zeile erreicht haben.
- 6) Um eine neue Zeile zu schreiben, drehen Sie die Papierwinde auf der linken Ecke im Uhrzeigersinn bis Sie einen Klick fühlen. Jeder Klick steht für eine Zeile. Sie können dabei den Zeilenzeiger auf der rechten Seite zum finden der Zeilenposition benutzen.

Ihre Braille lesen

Um eine geschriebene Zeile Braille zu lesen:

- 1) Drehen Sie das Jot a Dot in die Leseposition: (siehe Sektion "Papier einlegen"). Denken Sie daran den Lesestandfuß vorher in eine aufrechte Position zu stellen;



- 2) Drehen Sie die Papierwinde im Uhrzeigersinn. Die Oberseite der Seite wird sich weiter aus dem Papiereinschub unter der Papierablage bewegen und Ihre Braille wird erscheinen. Abhängig von der Fingergröße, muss um zwei Zeilen gedreht werden um die Braille zu lesen;

Abbildung: die Leseposition

- 3) Sie können an dieser Stelle fortsetzen Braille zu schreiben, dabei erhalten Sie zwei Leerzeilen. Für eine einzelne Leerzeile, drehen Sie die Papierwinde zurück (gegen den Uhrzeigersinn). Überprüfen Sie Zeilenposition mit dem Zeilenzeiger;

- 4) Drehen Sie das Jot a Dot zurück in die Schreibposition;
- 5) Schieben Sie den Zeilenzeiger zur linken Seite und fahren Sie mit dem schreiben fort.
- 6) Um die Seite zu entnehmen nachdem Sie fertig sind, drehen Sie die Papierwinde im Uhrzeigersinn und das Papier wird auf der Unterseite des Jot a Dot ausgegeben.



Merke: wenn das Papier unter der Papieraufgabe festklemmt, sehen Sie unter der nächsten Sektion "Wartung" nach wie Sie das Papier am besten entfernen.

Hilfreiche Tipps

***Jot a Dot* Wartung**

- 1) Wenn das Jot a Dot nicht benutzt wird, lagern Sie es in seiner Transportverpackung;
- 2) Reinigen Sie keine mechanischen Teile mit irgendwelchen Flüssigkeiten;
- 3) Wenn Kleinteile sich festsetzen, öffnen Sie das Jot a Dot mittels der Öffnungsclips (weiter unten erklärt) und schütteln Sie die Kleinteile heraus. In Extremfällen kann auch ein Staubsauger oder Saugapparat zum entfernen von Kleinteilen oder Staub benutzt werden;
- 4) Wenn nötig, wischen Sie die Oberfläche des Jot a Dot mit einem mit reinem Wasser leicht befeuchtetem Tuch ab;
- 5) Entfernen von zerknitterten oder kaputtem Papier aus dem Jot a Dot
 - a) Unter der linken und rechten Ecke des Jot a Dot sind zwei kleine Clips;
 - b) Legen Sie das Jot a Dot in die Leseposition;
 - c) Legen Sie Ihre Daumen auf die Innenseite der Clips und klammern Sie Ihre Finger auf die Unterseite des Jot a Dot;
 - d) Drücken Sie sie Clips jeweils nach Aussen, die Unterseite löst sich von der Oberseite des Jot a Dot mit einem Ruck;
 - e) Entfernen Sie vorsichtig jegliches Fremdmaterial und drücken Sie die beiden Hälften wieder sacht zusammen.
- 6) Befestigen und entfernen des Umhängegurtes

Um den Umhängegurt zu befestigen

 - a) Setzen Sie einen Clip von einem Ende des Gurtes an einer Ecke der Vorderseite des Jot a Dot an wo sich eine kleine Öffnung befindet;
 - b) Drücken Sie sachte bis Sie fühlen dass er richtig platziert ist;
 - c) Wiederholen Sie Schritt b mit dem Clip am anderen Ende des Gurtes und der anderen Ecke am Jot a Dot.

Um ihn zu entfernen, ziehen Sie sanft an dem Gurt, nahe wo er mit dem Jot a Dot zusammentrifft;

Merke: dies sind massive Klips und werden sich mit einem starkem Ruck öffnen.

Tipps

- 1) Bewegen Sie den Zellenzeiger erst wenn das Jot a Dot in der Schreibposition ist;
- 2) Die Verwendung von schwerem Papier und Karten beschädigen das Jot a Dot;
- 3) Die hintere Papieröffnung ist nicht zum einlegen von Papier geeignet;
- 4) Das Papier kann jegliche Länge haben. Nur die Breite ist begrenzt;

Garantie Angaben – Jot a Dot

Quantum Technology garantiert, im Raum der Garantie Voraussetzungen, dass das Jot a Dot frei von Defekten des Materials und der Fertigung bleibt bei normaler Verwendung und Pflege, für einen Zeitraum von 3 Monaten vom Kaufdatum von einem unserer autorisierten Händler.

Garantie Voraussetzungen

- 1 Die Garantie setzt nicht bei Schäden, Fehlfuntionen oder Fehlern ein die durch falsches benutzen, Verwendung von unpassendem Papiergrößen, Modifizierungen, Falschnutzung, Vernachlässigung, Mißbrauch, Nutzung von nicht autorisierten Personen zurück zu führen sind.
- 2 Unsere Verbindlichkeit im Bezug auf Reperatur und Austausch ist begrenzt.
- 3 Alle Frachtkosten in Verbindung mit Reparaturen liegen in der Verantwortung des Käufers.
- 4 Diese Garantie gilt nur für den ersten Käufer, und ist nur anwendbar im Land in dem es gekauft wurde.
- 5 Der Nutzen dieser Garantie sind zusätzlich zu allen anderen Konditionen, Garantien, Rechten oder Hilfsmitteln die von der Trade Practices Act oder ähnliche Verbraucherschutzgesetzgebung festgelegt haben im Land des Erwerbs.

GARANTIE und SERVICE SUPPORT

- 1 Kontaktieren Sie Ihren **Lokalen Händler** oder Quantum Technology unter www.quantumtechnology.com.au.
2. Wenn Sie Ihr Produkt zurück senden, stellen Sie sicher dass es ordnungsgemäß eingepackt ist.
3. Füllen Sie das folgende Formular mit Ihren Daten aus um im Falle eines Anspruchs auf Reperatur den Vorgang zu beschleunigen.

Name des Besitzers:.....

Adresse:.....

Seriennummer:.....

Datum des Kaufs:.....